
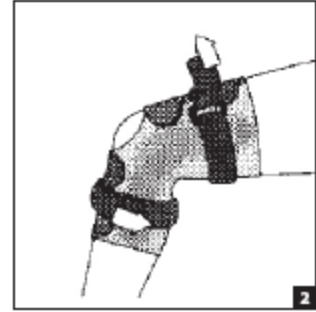


## مشد Reddie

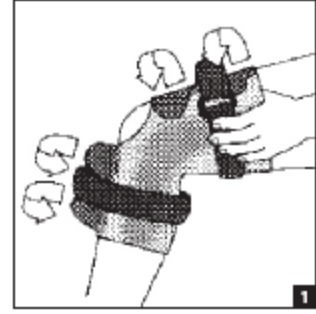

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

### دواعي الاستعمال:

إلتواءات الرباط الإنسي للرسغ و/أو الرباط الوحشي الجانبي • الروماتيزم الخفيف • بعد العملية استئصال المفصل • عدم الاستقرار الكلي الخفيف

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة لالتهاب الجلد أو حساسية للمنتجات المشتقة من نيوبرين.

تحذير: ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي في المجال الطبي.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام العام غير الخاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

### معلومات حول الاستعمال:

- (A) فك وأرخ أحزمة الفخذ وبطة الساق.
- (B) لف المنتج حول الساق واربطه فوق الساق من الأمام. ضع الكم بحيث تكون العالقات موازية لبعضها البعض، والجزء العلوي من الشق الدائري محاذاً مع الجزء العلوي من صابونة الركبة.
- (C) عدّل برغي الأحزمة (الخلفية) للفخذ وبطة القدم لتكون على قدر الجسم ومناسبة.
- (D) اربط أحزمة دعامة الفخذ وبطة الساق الأمامية.
- (E) النزع

للنزع، فك الأحزمة واللوحات الأمامية.

### الاستعمال والعناية:

- اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيّدًا. ونشفها في الهواء. قد يتم نزع العلاقات للغسيل.
- ملاحظة: إذا لم يشطف جيّدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جفّفه جيّدًا واشطفه بماء نظيف وماء عذب. ونشفها في الهواء.
- **كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- **لاستخدام مريض واحد فقط.**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.