
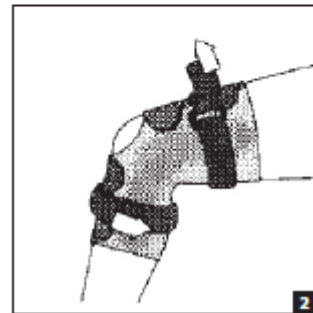


Reddie Brace™

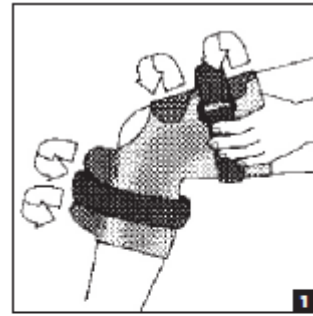

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות:

נקעים קלים של הרצועה הקולטרלית האמצעית ו/או הרצועה הקולטרלית הצדית • דלקת מפרקים קלה • לאחר ניתוח ארתרוסקופיה • חוסר יציבות כללית קלה

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי.

האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

- (א) התר ושחרר את רצועות הירך והשוק.
- (ב) כרוך את המוצר סביב הרגל וסגור בקדמת הרגל. מקם את הברכית כך שהצירים יקבילו זה לזה, והחלק העליון של הפתח העגול יקביל לחלק העליון של הפיקה.
- (ג) התאם את רצועות הירך האחורית והשוק להצמדה נוחה.
- (ד) הדק את רצועות התמיכה של הירך הקדמית והשוק.
- (ה) הסרה

להסרה, שחרר את הרצועות ואת הכנפיים הקדמיות.

שימוש וניקוי:

- יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. את הצירים יש להוציא כדי לכבס את הברכית.
- הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.
- ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש בפעילויות במים יש לנקז היטב ולשטוף במים מתוקים נקיים. יש לייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.