


## مشد الرسغ RespiForm

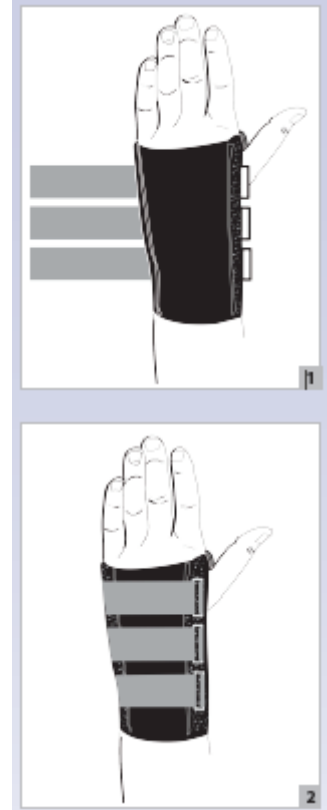

دعامة رسغ اليد

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

### هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- إلتواءات الرسغ.
- كسور الرسغ.
- قبل وبعد تشنج اليد والرسغ.

### هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- إلتواءات الرسغ.
- كسور الرسغ.
- قبل وبعد تشنج اليد والرسغ.

### تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

- يجب تعديل المشدات بالشكل الصحيح للحصول على الدعم الكافي.
- يمكن تعديل المشدات عندما يكون المشد في المكان.

(1) ضع اليد في الدعامة. اثني المشد من الألمنيوم قليلاً من ناحية قبضة الرسغ نحو باطن الكف.

(2) لف وثبت السدادات. أدخل الأحزمة من خلال حلقات D وثبتها.

### العناية

يغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويشطف تمامًا. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

بدون لاتكس



معدّ للاستخدام على مريض واحد

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.