


תומך FlexiForm לשורש כף היד

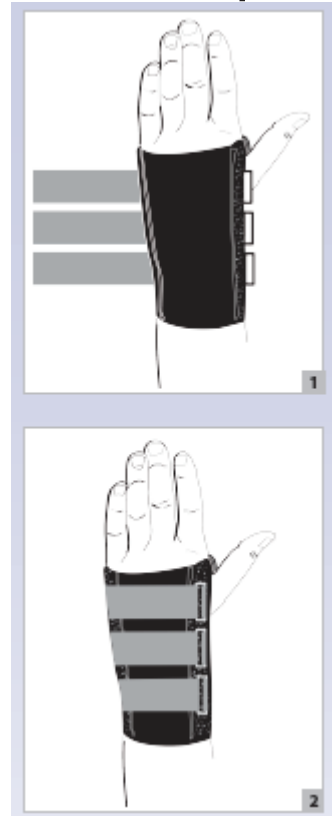

תומך לכף היד ולשורש כף היד

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- נקעים של שורש כף היד.
- שברים בשורש כף היד.
- מניעת תזוזה של כף היד ושורש כף היד לפני ולאחר ניתוח.

שימוש מיועד/התוויות

- נקעים של שורש כף היד.
- שברים בשורש כף היד.
- מניעת תזוזה של כף היד ושורש כף היד לפני ולאחר ניתוח.

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

- לתמיכה הולמת, יש להתאים את פסי התמיכה בצורה נכונה.
 - ניתן להתאים את פסי התמיכה לאחר שהסד נמצא במקומו.
- 1) הנח את היד בתומך. כופף מעט את פס האלומיניום מקפל פרק כף היד לכיוון כף היד.
- 2) כרוך והדק את סוגרי הצמדן. העבר את הרצועות דרך טבעות ה-D והדק אותן.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.