

RespiForm Wrist & Thumb
RespiForm Poignet-Pouce




RespiForm Wrist & Thumb RespiForm Poignet-Pouce

RESPIFORM MUÑECA Y PULGAR
RESPIFORM HANDGELENK UND DAUMEN
RESPIFORM POLSO E POLICE
RESPIFORM POLS EN DUIM
RESPIFORM ZÁPĚSTIA-PALCA
RESPIFORM HÅNDELED OG TOMMELFINGER
RESPIFORM HANDLED OCH TUMME
RESPIFORM HÅNDELEDDET OG TOMMELEN
RESPIFORM RANNE-PEUKALO
RESPIFORM ZÁPĚSTÍ-PALCE





1

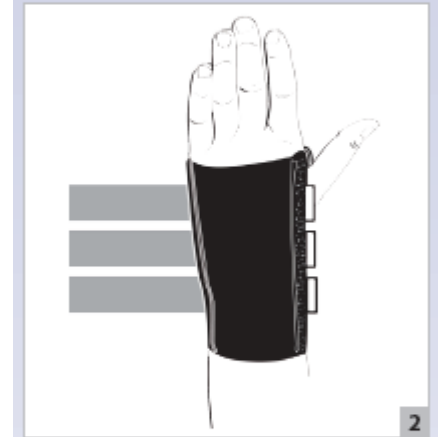

2



3

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- مثالي للالتواء، للإجهاد وللإصابات في مفصل وأربطة المعصم والإبهام أو للتنشيط قبل/بعد عملية جراحية.

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.
تعليمات الاستعمال

(1) حرّر الأحزمة وأدخل يدك للدعامة بحيث يستريح الإبهام في سناد التباعد. ينبغي أن يرتاح سناد راحة اليد على منطقة راحة اليد والمعصم في اليد.

ملاحظة: السناد مرن ويمكن تكيفه ليناسب الاحتياجات الفردية.

(2) لفّ حزام الإبهام واربطه بإحكام.

(3) ابتداء من اليد، مرّر الأحزمة عبر حلقات "D" وأحكام إغلاقها، استمر باتجاه أعلى الذراع.

العناية

اغسلها في مياه باردة مع صابون معتدل ونشفها في الهواء. لا تستعمل مواد التبييض.
لا تنظفها بالتنظيف الجاف أو بالنشافة. الكي ممنوع.

بدون لانتكس
معدّ للاستخدام على مريض واحد
بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ
البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.