
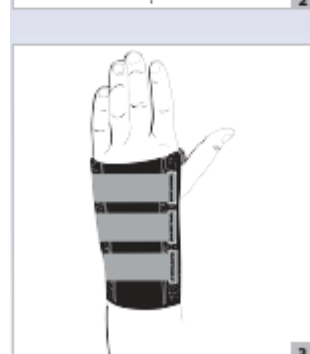


תומך FlexiForm לשורש כף היד ולאגודל

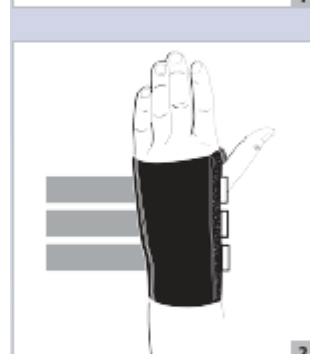

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

• אידאלי לנקעים, מתיחות, פציעות במפרקים וברצועות של שורש כף היד והאגודל או מניעת תזזה לפני/לאחר ניתוח.

התוויות נגד

• אין

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

1) שחרר את הרצועות והחלק את היד אל התומך כשהאגודל נח בפס ההצדדה. פס התמיכה של כף היד צריך להיות מונח על אזור כף היד ושורש כף היד.

הערה: פסי התמיכה הם כפיפים וניתן להתאימם לצרכים האישיים.

2) כרוך והדק את רצועת האגודל.

3) התחל מכף היד, העבר את הרצועות דרך טבעות ה-D והדק אותן, תוך התקדמות במעלה הזרוע.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר. אין להשתמש בחומר מלבין. אין לנקות בניקוי יבש או לייבש במייבש כביסה. אין לגהץ. נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.