

ברכית גמישה ROTULAX



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים חיוניים לתפקודו התקין של האביזר.

התוויות

- ייצוב כללי של פגיעת ברך חריפה
- שימוש מונע במקרה של גמישות יתר של פיקת הברך
- גירוי פרופריוצפטיבי ונירומוסקולרי באמצעות לחץ

התוויות נגד/אזהרות

אין

הוראות יישום

אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. משוך את הברכית על הברך.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לשימוש המטופל

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.