

## مشد الرضفة ROTULAX ELASTIC KNEE OPEN PATELLA



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. دلالات الاستعمال

- تثبيت عام لإصابة حادة في الرضفة.
- للاستخدام الوقائي في حالة الارتخاء المفرط في الرضفة
- التحفيز الذاتي والتحفيز العصبي من خلال الضغط

### موانع الاستعمال/احتياطات:

لا توجد

### تعليمات الاستخدام

- (1) امسك حواف الكم من الفتحة الأوسع. اسحب الكم فوق الركبة.
- (2) بخصوص الأكمام مع الدوائر أو قواطع الرضفة، ضع الكم بحيث تكون الدائرة أو القاطع متمركزة على صابونة الركبة.

### تعليمات العناية

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

### هذا المنتج مخصص

لاستخدام مريض واحد فقط.

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.