


SCOI Shoulder Brace

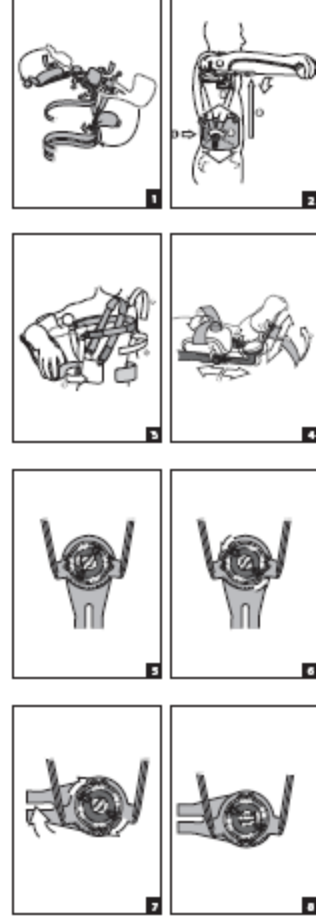

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: لتصليحات الكفة المدورة (مجموعة من العضلات والأوتار التي تقوم بتثبيت الكتف) • إزاحة المحفظة • إجراءات Bankhart • استبدال صناعي للكتف

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. لتوفير الراحة ولتسهيل الاستعمال بعد عملية جراحية، يصى بملائمة هذه الدعامة مسبقاً للمريض قبل الجراحة.

موانع الاستعمال: لا يوجد

معلومات حول الاستعمال:

(1) حرّر المفاصل بالكتف، الكوع، والكفة وبكمّ أعلى الذراع وضع مفصلي الكتف بين زوايا التبعيد 60 و-90 درجة. يمكن تكييف الدعامة لجهة اليمين أو اليسار من خلال تدوير قسم القدم الامامية 180 درجة في مفصل الكوع. رفائد مفاصل الكتف قابلة للإزالة وينبغي إعدادها بحيث تكون رفادة جلد الغنم بالخلف، والرفادة الاسفنجية بالأمام. افتح كل الأحزمة، قم بطي أطراف الأحزمة للخلف على نفسها لتسهيل التعامل. حرّر، ولكن لا تقم بإزالة المقابض في المواقع المبينة.

(2) عدّل قضيب الجذع وفقاً لطول المريض من خلال وضع لوح الورك الكبير في البداية بحيث يكون الإسفين الإسفنجي الذي داخل اللوح على عرف الحرقفة. حرر المقبض على اللوح و عدّل ارتفاع قضيب الجذع بحيث تكون مفصلة الكتف العليا مصفوفة فوق المفصل الحقاني عضدي. ينبغي أن تكون ذراع المريض مرتاحة في أكمام العضد والساعد بالدعامة. شدّ مقبض تعديل الارتفاع إلى واحد من بين أربعة أوضاع ارتفاع محددة.

(3) إذا كان المريض بوضعية استلقاء، انقل المريض لوضع جلوس مستقيم وقم بتمرير حزام الكتف للأعلى فوق الكتف غير المصابة وحزام الصدر على أعلى الظهر. ضع حزام الخصر عبر الطاولة، وراء المريض تماماً فوق مستوى الورك. ارجع المريض إلى وضع استلقاء واربط الأحزمة الثلاثة حسب الترتيب التالي: 1. حزام الكتف (وصله بلوح الورك)، 2. حزام الصدر (حوالي الظهر وتحت الذراع المعاكسة، وصله بالحلقة العلوية الامامية على القضيب المستقيم، و-3. تمرير حزام الخصر فوق منطقة المعدة. تأكد من أن كل الأحزمة مشدودة. استخدم النقاط الملونة المشفرة التي على الأحزمة للمساعدة في تحديد مكان وجود نقاط الربط المناسبة.

ملاحظة: تستعمل قطع الأبريم الموصولة برفائد حزام الكتف والصدر من أجل وصل الحزامين معاً حيث يتقاطعان في الجزء الأمامي والخلفي من الصدر. سيساعد ذلك في الحفاظ على الأحزمة في مكانها.

(4) حرّر مقبضي التعديل الموجودين على أحد جوانب قضبان دعم الذراع العليا. عدّل الجزء العضدي من الدعامة بحيث تتمركز رفادة الكوع/المفصلة تحت كوع المريض. شدّ ثمانية مقبضي التعديل. شدّ أحزمة الكمّ العضدي. حرّر المقبضين الذين على السطح السفلي من قضيب الساعد. حرك كمّ الساعد حتى يصبح قسم الدعامة مع الزند للأعلى مرتاحاً في راحة اليد. كما يمكن أيضاً تدوير الكمّ ليتكيف مع البسط والكبّ. شدّ المقابض ثمانية واربط حزام الساعد بإحكام. بينما تكون الذراع بوضع التثبيت المرغوب، اقلل كل المفصلات.

تعليمات لتعديل المفصلة

- (5) حرّر مقبض الأمان الأسود الصغير 1-1-1/2 دورات بعكس اتجاه عقارب الساعة.
- (6) قم بتدوير مقبض التعديل الأسود حتى يلائم داخل الموقع الحر.
- (7) حالما تصبح المفصلة في المكان المرغوب من حيث التباعد، قم بتدوير مقبض التعديل الأسود حتى يستقر في وضعية الإقفال.
- (8) شدّ مقبض الأمان باتجاه عقارب الساعة لضمان إحكام المفصلة.

الاستعمال والعناية

- ينبغي توجيه المريض ليفحص إحكام المقابض بانتظام.
 - لوح الورك قابل للتشكيل بالحرارة إذا كانت هناك ضرورة لتغيير طفيف في الشكل.
 - يمكن تنظيف البطانة باليد بماء بارد. نشفها في الهواء.
- استشر طبيبك أو المعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.
- تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.