
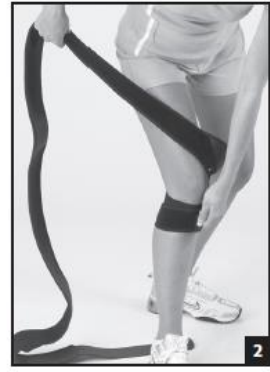


Strap .S.E.R.F

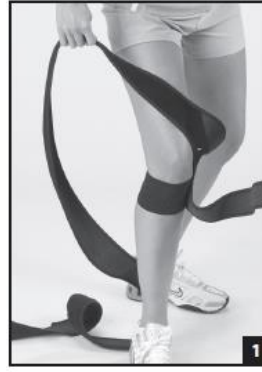

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: لألم فحذي رضفي أو أمامي في الركبة ناتج عن دوران وتقريب داخلي زائد بالورك

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

ملاحظة: الاستعمال المبين أدناه هو للساق الأيمن، يتم وضع الحزام الأيسر بنفس الأسلوب.

- (1) أدخل الساق عبر شريط بطة الساق المرنة. ضع طرف الحزام الطويل وراء لقمة الفخذ الإنسية (داخل الركبة). يجب أن يظهر شعار DonJoy على الجانب الداخلي من الركبة. (الشكل 1)
 - (2) حافظ على شريط بطة الساق المرنة في مكانه، لفّ "حزام بطة الساق" حول عضلة بطة الساق العليا، واربط بإحكام الحزام مع لسان الفيلكرو. (الشكل 2)
 - (3) لفّ الحزام الطويل حول الفخذ، فوق الركبة. سوف يتشابك الحزام ويتصالب، في القسم الأمامي الداخلي من الفخذ (كما هو مبين بالرسم التوضيحي). تأكد من أن الجزء المتشابك يقطع الفخذ بخط مائل، وذلك باستخدام الفيلكرو كدليل. (الشكل 3)
 - (4) قف بحيث يكون معظم وزن جسمك على القدم السليمة (اليسار). بينما يكون الكعب الأيمن ملامساً للأرض قليلاً، افتل (اسحب) عظم الفخذ لدوران خارجي من خلال سحب الحزام عبر الفخذ إلى الورك. اسمح للقدم بالدوران نحو الخارج (اصبع القدم للخارج). الشكل 4
 - (5) لفّ الحزام حول الورك، بحيث يكون فوق الحوض والمذوّر الكبير، ولكن تحت العرف الحرقفي (في الجزء العلوي من الوركين). تثبت الحزام بواسطة لسان الفيلكرو. تأكد من أنه قد تم وضع الحزام بإحكام. (الشكل 5)
- علامات إعادة الاستعمال**
- بعد إكمال جلسة الملازمة الأولية مع المريض، يستطيع أخصائي الرعاية الطبية وضع علامات إعادة الاستعمال المرفقة على الدعامة لمساعدة المريض عند إعادة الاستعمال.
- (6) اربط واحدة من علامات إعادة التطبيق الصغيرة للجزء الأوسط المتداخل (الداخلي) من الحزام عن طريق جعل الخط الأبيض (تحت شعار DonJoy) بالعلامة بخط مستقيم مع الخط الأبيض على الحزام.
 - (7) ضع علامة إعادة الاستعمال الصغيرة الثانية في النقطة التي يتداخل بها الحزام مع نفسه على الوركين.
 - (8) صفّ علامة DonJoy الكبيرة بالقرب من إبزيم الحزام، بحيث تكون علامات إعادة بصف واحد مع خط وسط الجسم.
- المحتويات:** حزام فخذي، 3 علامات لإعادة الاستعمال (2 صغيرتان، 1 "إبزيم الحزام").
- يرجى ألا تضع علامات إعادة الاستعمال حتى تتم ملازمة الحزام بشكل صحيح.
- تعليمات التنظيف:** يغسل باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، اشطفه جيداً. ونشفها في الهواء. **ملاحظة:** إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج أو تلف المواد.
- كفالة:** سنقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- لاستخدام مريض واحد فقط.**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.