


רצועת S.E.R.F.

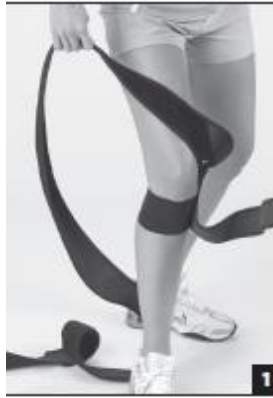

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: לכאב בפיקת הברך או בקדמת הברך הנובע מסיבוב והצדדה פנימיים חריפים של האגן

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

הערה: היישום המוצג מיועד לרצועת רגל ימין. יש ליישם באופן אופן לרצועת רגל שמאל.

(1) החלק את הרגל דרך רצועת השוק האלסטית. מקם את הקצה הארוך של הרצועה מאחורי הזיז האמצעי של הירך (בצד הפנימי של הברך). הלוגו של DonJoy יופיע בצד הפנימי של הברך. (תרשים 1)

(2) החזק את רצועת השוק האלסטית במקומה, כרוך את "רצועת השוק" הקצרה סביב שריר השוק העליון, וסגור את הרצועה באמצעות לשונית הצמדן. (תרשים 2)

(3) כרוך את הרצועה הארוכה סביב הירך, מעל הברך. הרצועה תחפוץ ותחצה את החלק הפנימי הקדמי של הירך (כפי שמוצג בתרשים). ודא שהחלק החופף חוצה את הירך בקו אלכסוני - השתמש בצמדן כבקו מנחה. (תרשים 3)

(4) עמוד כשמרבית משקל הגוף שלך על הרגל הבריאה (שמאל). כאשר העקב הימני נוגע מעט ברצפה, משוך את הירך לסיבוב חיצוני על ידי משיכת הרצועה לאורך הירך אל האגן. תן לכף הרגל להסתובב החוצה (אצבעות כלפי חוץ). (תרשים 4)

(5) כרוך את הרצועה סביב המותניים, כך שתשב על האגן ועל תל הירך הגדול, אך מתחת לעצם הכסל (בחלק העליון של אגן הירכיים). עגן את הרצועה בעזרת לשונית הצמדן. ודא שהרצועה מהודקת. (תרשים 5)

סמני יישום חוזר

לאחר שפגישת ההתאמה הראשונית עם המטופל הושלמה, איש הצוות הרפואי יכול למקם את סמני היישום החוזר על הרצועה כדי לסייע למטופל ליישמה מחדש.

(6) חבר את אחד מסמני היישום החוזר הקטנים לחלק האמצעי (הפנימי) החופף של הרצועה ביישור הקו הלבן (מתחת ללוגו של DonJoy) מול הסמן עם הקו הלבן שעל הרצועה.

(7) מקם את סמן היישום החוזר הקטן השני בנקודה שבה הרצועה חופפת את עצמה באגן הירכיים.

(8) יישר את סמן ה-DonJoy הגדול שלייד אבזם החגורה, תוך יישור סימני הקווים עם קו האמצע של הגוף.

תכולה: רצועת ירך, 3 סמני יישום חוזר (2 קטנים, 1 "אבזם חגורה").

אין לחבר את סמני היישום החוזר עד שהרצועה הותאמה כהלכה.

הוראות ניקוי: יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר.

הערה: אם האביזר לא נשטף היטב, שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי או להתפוררות החומר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.