
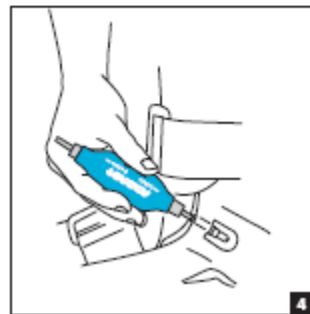
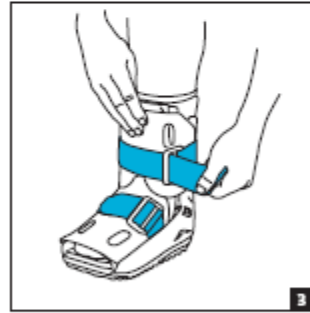


جهاز المشي SP Walker

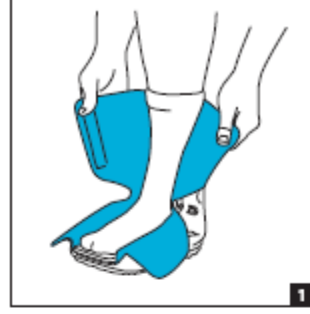

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال:

فعال لمعالجة إصابات مقدمة القدم، والمشط ومؤخرة القدم؛ كسور القدم؛ عمليات وإصابات الأنسجة اللينة والأربطة؛ الألام الحادة أو بعد العملية الجراحية (أي استئصال الوكعة، العظم، الخ)؛ والتواءات الكاحل. إنها ناجعة في التئام الكسور ومعالجة الوذمة.

موانع الاستعمال: لا ينطبق

تحذيرات واحتياطات:

لا يتبالغ في نفخ الخلايا الهوائية. قد يسبب النفخ غير الصحيح للخلايا الهوائية تمزق شديد في الجلد لدى المرضى المصابين بالاعتلال العصبي السكري. تخفيض ضغط خلايا الهواء عند ظهور أي تغيرات في الجلد أو الشعور بعدم الارتياح. لا تستخدم هذا الجهاز للمرضى العاجزين عن التواصل الجسدي غير المريح.

مثل كل مثبتات الأطراف السفلية، مثل القوالب أو المشدات والمرضى دون حساسية (أي بعد عملية التخدير، علاج الأعصاب، الخ) ويجب مراقبتها من قبل أخصائي الرعاية الصحية عدة مرات من أجل "النقاط الساخنة"، تهيج الجلد، ومعالجة الجروح، أو تلون الجلد. ينبغي توخي الحذر عند المشي على أسطح زلقة أو رطبة لتجنب الإصابات.

يحدد القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.
معلومات حول الاستعمال: (لبس جورب من القطن أو الجبس سيزيد من الراحة - غير مشمول)

1. حضّر المشد - اربط الأحزمة، انزع اللوحة الأمامية، وافتح البطانة.

2. استخدم المشد - أثناء الجلوس، ضع القدم في المشد .

ضع الكعب في الجزء الخلفي من الدعامة واسحب البطانة للأمام للتخلص من أي تجاعيد (الشكل 1). لف البطانة حول القدم، ثم الكاحل، وانتهها بلطف واربطها (الشكل 2).

ضع اللوحة الأمامية بحيث يكون شعار AIRCAST فوق أصابع القدم.

ثبت اللوحة الأمامية مع الجزء السفلي داخل المشد، والجزء العلوي خارج المشد. أقلل الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى (الشكل 3). شدّها حتى تصبح محكمة ومريحة.

3. عدّل ضغط خلية الهواء - تكون خلايا مشد المشي SP-Walker مفرغة من الهواء بشكل مبدئي للنفخ، ادخل طرف "النفخ" من المنافخ اليدوي في صمام خلية الهواء في أعلى المشد واضغط حتى تشعر بأن خلية الهواء تنطبق على قدر الجسم (الشكل 4). ابدأ بالصمام في داخل الساق ثم الصمام على خارج الساق.

في حالة الإفراط بالنفخ، أخرج الهواء من الخلايا الهوائية. لإخراج الهواء من الخلايا الهوائية، أدخل رأس التفريغ (deflate) بالأداة اليدوية في الصمام واضغط حتى يصبح الضغط مريحاً.

يوفر الضغط العالي دعماً أكبر عند المشي، بينما يكون الضغط المنخفض مريحاً أكثر عند الجلوس أو الاستلقاء. (كما يمكن تعديل الضغط بواسطة شدّ أو تحرير الأحزمة).

العناية

يمكن غسل بطانة SP WALKER يدوياً في

ماء بارد مع منظف لطيف ويجفف في الهواء. لا تضعه في النشافة أو تستعمل مصدراً آخرًا للحرارة لتجفيفه.

الارتفاع العالي:

سنتمدد خلايا الهواء في الارتفاعات العالية أبعد

من مستواها الأمثل. عدّل ضغط خلية الهواء

من خلال شدّ أو تحرير الأحزمة.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

RX فقط

بدون لاتكس

مخصص لاستخدام مريض واحد.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفيدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز من قبل أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.