


תומך StabilAir לפרק כף היד

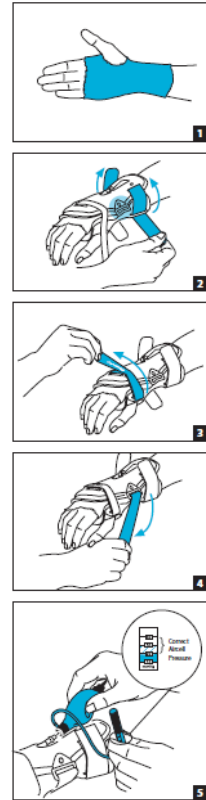

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

תומך StabilAir לפרק כף היד מיועד ליישומים לאחר ניתוח בשברים בעצם החישור המרוחקת.

התוויות נגד:

אין להשתמש בתומך StabilAir לפרק כף היד במטופלים שאינם מסוגלים לתקשר תחושות אי-נוחות.

אזהרות:

אין לנפח את כרית האוויר יתר על המידה. ניפוח לא נכון של כרית האוויר עלול לגרום לגירוי ניכר של העור באנשים עם ניורופתיה סוכרתית. הפחת את הלחץ בכרית האוויר בכל מקרה שנצפה שינוי בעור או שקיימת אי-נוחות. אין להשתמש באביזר זה במטופלים שאינם מסוגלים לדווח על אי-נוחות גופנית. שינויי גבהים עלולים להשפיע על הלחץ בכרית האוויר. כוונן את הרצועות להתאמה נוחה ובדוק את הלחץ בכרית האוויר באמצעות בלון הניפוח הידני עם מד הלחץ (ראה הוראות). בדומה לכל אמצעי הקיבוע לגפיים העליונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר

אלחוש לאחר ניתוח, ניורופתיות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד של איש צוות רפואי לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או שינוי בצבע האצבעות, ולטיפול בפצעים.

אופן היישום:

1. שחרר את הרצועות ופתח את התומך. הלבש את שרוולית פרק כף היד (כלולה) על יד המטופל כאשר הבהן יוצאת מהחור.
 2. הנח את פרק כף היד של המטופל בחלק התחתון של התומך כאשר הבהן יוצאת מחור הבהן. ישר את החלק העליון של התומך כך שהטבעת הלבנה תהיה בצד הפנימי של פרק כף היד. הנח את החלק העליון של התומך על פרק כף היד. השחל את רצועת הזרוע "1" דרך הלולאה המורמת בחלק התחתון של התומך והדק אותה, חזור על כך עבור רצועה "2".
 3. כוונן את שתי הרצועות כך ששני הצדדים של החלק העליון של התומך יהיו באותו מרחק מהחלק התחתון שלו. השחל את רצועת היד "1" דרך הלולאה המורמת שבחלק התחתון של התומך והדק אותה.
 4. השחל את הרצועה המרכזית דרך הטבעת הלבנה שבחלק העליון של התומך וסגור אותה. הדק את כל הרצועות עד שהיד תהיה עטופה היטב ותרגיש בנוח.
 5. נפח את כרית האוויר באמצעות בלון הניפוח הידני:
- לניפוח, דחוף בחוזקה את הקצה המיועד לניפוח של הבלון הידני לתוך שסתום כרית האוויר שבחלק העליון של התומך.

- לחץ את בלון הניפוח הידני עד שהקצה התחתון של מד הלחץ השחור יהיה מעל המספר 40
- השאר את בלון הניפוח הידני בתוך השסתום והפסק ללחוץ – מחוון מד הלחץ ייפול באיטיות.
- הסר את בלון הניפוח הידני מהשסתום כאשר הקצה התחתון של המחווון יגיע אל בין המספרים 20-40 מ"מ כספית
- הוצא אוויר מכריות האוויר לפני הסרת התומך. כדי להוציא אוויר, הכנס בחוזקה את קצה הוצאת האוויר של בלון הניפוח הידני לתוך שסתום כרית האוויר ולחץ על בלון הניפוח.

הקפד לבדוק את הלחץ בכרית האוויר בעזרת מד

הלחץ בכל פעם שמתאימים את התומך ו/או מהדקים או משחררים את הרצועות. דיוק מד הלחץ הוא $\pm 20\%$.

6. לאחר כוונן הלחץ בכרית האוויר, לשיפור הנוחות ניתן לגזור את הרצועות במספרים.

הוראות ניקוי: יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר. אין להשתמש בחומר מלבין או במרכך כביסה. אין לאפשר לנוזלים להיכנס לשסתום שבחלק העליון של התומך.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הנקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי

איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.