
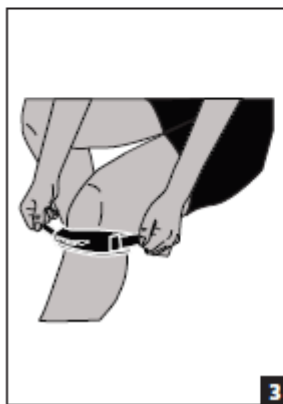
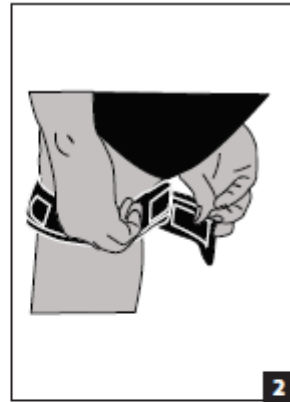


רצועת פיקה® Surround

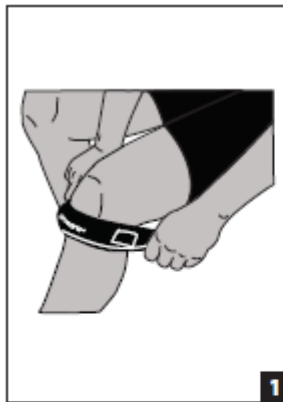

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: ברכ קופצים (דלקת של גיד הפיקה), ברכ אצנים (כונדרומלציה), מחלת אוסגוד-שלטר.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום: שב על קצה הכיסא או עמוד עם הרגל ישרה.

(1) מקם את הרצועה הראשית עם התמיכה הגלילית בשקע הטבעי מעט מתחת לפיקת הברך שלך. (הקשירה בצד אחד של הרצועה צריכה להיות כלפי מטה).

(2) הדק את קצה הרצועה הראשית מאחורי הברך או, אם יש צורך במינוף נוסף כדי להבטיח הצמדה נוחה, הדק את קצה הרצועה בצד הברך ולאחר מכן סובב את הרצועה, ומרכז את התמיכה הגלילית מתחת לפיקת הברך.

(3) אחוז בקצות התמיכה הגלילית ומשוך כלפי החלק האחורי של הברך. הדבר יחבוק את התמיכה הגלילית לנוחות והתאמה מיטבית. הארוכה מבין שתי רצועות התמיכה צריכה לאבטח ו"לנעול" את קצה הרצועה הראשית.

הוראות ניקוי:

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה:
יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

פטנט תלוי ועומד.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.