


## TROMTM Advance Full

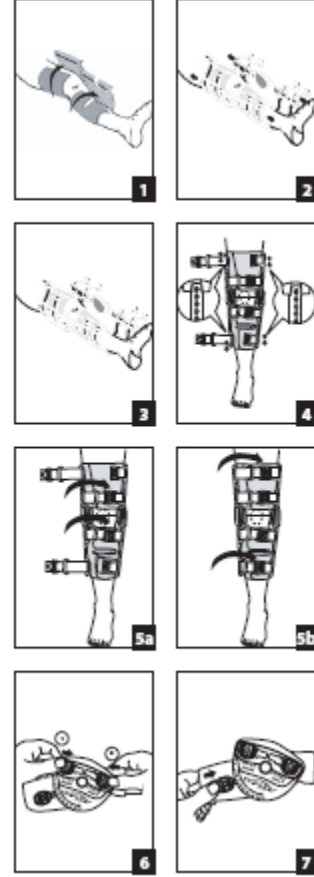

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للتثبيت ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصلجات الهاللة. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للآلام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد ضبط مدى الأوضاع الحركية، وتيرة ومدة الاستخدام من قبل أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف الدعامة

**موانع الاستعمال:** لا يوجد

**تحذيرات واحتياطات:** إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

**معلومات حول الاستعمال:**

- 1) افتح ايزيم كل واحد من أحزمة الدعامة وأخرج أغلفة الإسفنج من الدعامة. لفّ رفادات بطة الساق والفخذ بشكل محكم حول الساق واربطها بشكل أمامي (مقدمة الساق). يمكن تشذيب الإسفنج لتطابق بشكل مناسب.
- 2) عدّل طول القضيبي بواسطة الضغط على الزر الرمادي وفتح قضيب التمديد للطول المرغوب. يجب أن يتم مد الزر بالكامل حتى بعد التعديل للتحقق من تثبيت الوضع ويجب مساواة كلا القضيبين في الطول. يمكن تمديد قضبان ما بعد العملية لطول الساق الكامل حتى الكاحل.
- 3) ضع تركيب قضيب الجهة الجانبية (الخارجي) واضغطه في مكانه بحيث تترافق المفصلة مع الرضفة (عظمة الركبة) وخط وسط الساق.
- يشكل الكعب الوحشي والمدور الأكبر في الورك نقاطاً مرجعية جيدة للترافق مع خط الوسط. كرّر العملية مع القضيب الإنسي (الداخلي). تأكد من أن طول المفصلة الإنسية والجانبية متساويًا.
- 4) لتعديل وضع الأحزمة على الساق، اضغط على الزر الرمادي وادخل مجاديف حزام Tele-Fit إلى المكان المرغوب على الساق.
- 5) اربط الحزامين الأقرب إلى الركبة، ثم اسبقها بالحزامين المتبقين. فك الأحزمة بسحب الأحزمة بعيداً عن الإطار، واسحب الأحزمة وشدها لتنزع يتمهل خلف الساق بينما تحافظ على وضع العلاقة والقضبان على الساق. يمكن تشذيب الأحزمة للحصول على تطابق مناسب ويمكن إعادة وضع طرف الحزام إلى الحافة الجديدة من الحزام.

- (6) لتعديل الانثناء والتمدد، ادخل الأزرار الموجودة على حقيبة التعليق إلى أوضاع الانثناء/التمدد المطلوبة كما هو محدد من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. قد تحتاج لنقل قضيب العَلاقة إلى وضع التمدد المطلوب على الحافة الخارجية للعلاقة بالترتيب لتكون قادرًا على نقل زر التمدد.
- (7) لإغلاق العلاقة، انقل قضيب العَلاقة إلى الوضع المطلوب على الحافة الخارجية للعلاقة. ادخل علاقة زر الإغلاق الموجودة على قضيب الفخذ في الوضع المغلق لكي ينتقل السهم نحو مركز العلاقة.
- (8) لخلع سهل كقطعة واحدة، فكّ الأباريم واقتح الرفاند الإسفنجية. وعندها يمكن خلع الدعامة ولبسها ثانية كوحدة واحدة.
- (A) قد تنتهي قضبان العَلاقة لتضيق تعارض للقفوس أو المرفق. اثن كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعَلاقة.
- (B) لتسهيل الاستخدام بعد العمليات الجراحية، أو قبل المطابقة المشد قبل عملية الجراحة إذا ذلك كان ممكنًا.
- تعليمات التنظيف:** تغسل يدويًا في ماء بارد مع منظف لطيف. جففه في الهواء فقط، لا تسخنه.
- يرصى بتنظيف المكونات بشكل منتظم. يمكن قص الاسفنج. استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالمشد.
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.**
- RX فقط**
- بدون لاتكس**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.