


TROM™ Advance Full

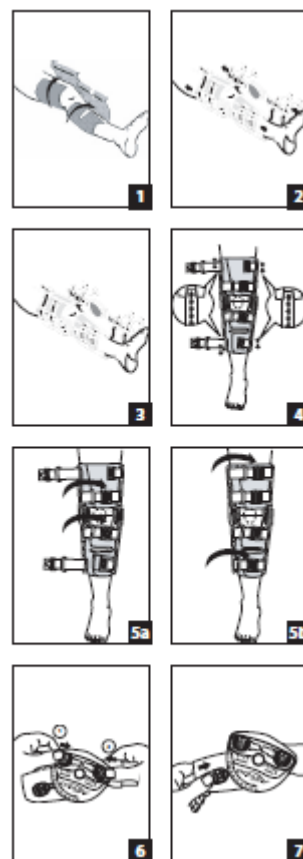

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים חיוניים לתפקודו התקין של האביזר.

שימוש מיועד/התוויות: למניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לניתוחי רצועה צולבת קדמית (ACL), רצועה צולבת אחורית (PCL), רצועה קולטרלית צדית (LCL) ורצועה קולטרלית אמצעית (MCL) ולתיקונים של המניסקוס.

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. הרופא שרשם לך את המוצר יקבע את הגדרת טווח התנועה, התדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

(1) שחרר את האבזם שעל כל רצועה של המייצב והסר את עטיפות הספוג מהמייצב. כרוך את רפידות הספוג לשוק ולירך באופן צמוד סביב הרגל וחבר מלפנים (בקדמת הרגל). להתאמה נכונה ניתן לגזור את הספוג.

(2) כוונן את אורך המוטות בלחיצה על הכפתור האפור והחלקת מוט ההארכה לאורך הרצוי. הכפתור צריך לפנות מעלה לחלוטין לאחר ההתאמה כדי להבטיח מצב מאובטח, ושני המוטות חייבים להיות זהים באורכם. המוטות לאחר-ניתוח ניתנים להארכה לאורך המלא של הרגל עד הקרסול.

- 3) מקם את מכלול מוטות הצד הרחביים (החיצוניים), וישר את הציר מול פיקת הברך וקו האמצע של הרגל.
- הפטישון החיצוני והטרונטר הגדול באגן הירכיים משמשים נקודות התייחסות טובות ליישור לפי קו האמצע. חזור על כך עבור המוט המדיאלי (הפנימי). ודא שהגובה המדיאלי והרוחבי של הציר שווים.
- 4) כדי לכוון את מיקום הרצועות על הרגל, לחץ על הכפתור האפור והחלק את משוטי רצועת ה-Tele-Fit למיקום הרצוי על הרגל.
- 5) הדק את שתי הרצועות הקרובות ביותר לברך, ולאחר מכן המשך עם שתי הרצועות הנותרות. שחרר את הרצועות במשיכתן הרחק מהמסגרת באופן הדוק כדי להסיר את המרווח שמאחורי הרגל תוך שמירה על מיקום הציר והמוטות על הרגל. אפשר לחתוך את הרצועות להתאמה נכונה ואת קצה הרצועה אפשר למקם מחדש בקצה החדש של הרצועה.
- 6) כדי לכוון כפיפה ופשיטה, החלק את הכפתורים שנמצאים על מארז הציר להגדרת הכפיפה/הפשיטה הרצויות כפי שנקבעו על ידי איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר. להגדרת הפשיטה הרצויה ייתכן שיהיה עליך להזיז את מוט הציר על השפה החיצונית של הציר, כדי שתוכל להזיז את כפתור הפשיטה.
- 7) כדי לנעול את הציר, הזז את מוט הציר על השפה החיצונית של הציר להגדרת הרצויה. החלק את כפתור נעילת הצירים, הממוקם על מוט הירך, למצב הנעול, כך שהחץ ינוע לעבר מרכז הציר.
- 8) להסרה קלה כיחידה אחת, שחרר את האבזמים ופתח את רפידות הספוג. לאחר מכן ניתן להסיר את המייצב ולהניחו מחדש כיחידה אחת.
- א) זרועות הצירים עשויות להיות כפופות להוספת קווי מתאר של וארוס או ולגוס. כופף כל זרוע צדית במידה שווה מעל ומתחת לציר.
- ב) לנוחות שימוש מיטבית לאחר ניתוח, התאם מראש את המייצב לפני הניתוח במידת האפשר.
- הוראות ניקוי:** יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום.
- מומלץ לנקות את המייצב באופן סדיר. ניתן לחתוך את כל הספוגים. לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.
- אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
- מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

במרשם בלבד

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות בהוראתו. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.