
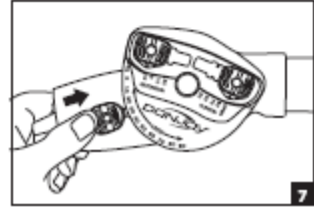
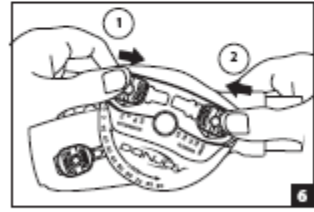
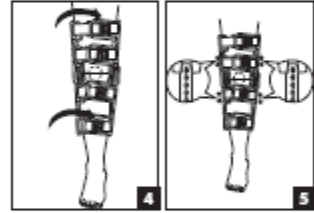
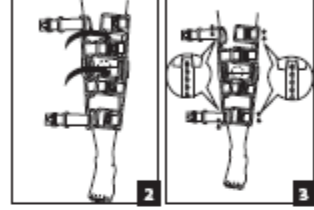


TROMTM Advance/ TROMTM Adjuster

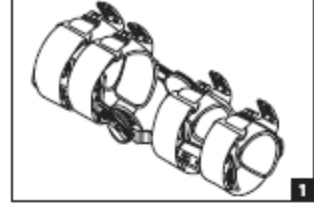

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للتنشيط ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصلحات الهلالية. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد ضبط مجال الحركية، تكرار ومدة الاستخدام من قبل أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف الدعامة

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

- 1) فك الإبزيم على كل حزام ومد المشد للخارج منبسطاً. ضع الساق في داخل المشد وعدّل الأحزمة لمكان تجميع القضبان بحيث تكون كل علاقة محاذاة مع الرضفة (صابونة الركبة) وخط الوسط للساق على كلا الجانبين الأوسط والجانبي من الساق.
- 2) اربط الحزامين الأقرب إلى الركبة.
- 3) عدّل طول القضيب بواسطة الضغط على الزر الرمادي وإدخال قضيب التمديد إلى الطول المرغوب. تأكد من أن كلا القضيبين متساويين في الطول وأن كل مجداف حزام مجدول لنفس الوضع على كل مكان لتجمع القضبان.
- 4) اربط الحزامين الأقرب إلى الركبة. فك الأحزمة بسحب الأحزمة بعيداً عن الإطار، واسحب الأحزمة وشدها لتتزع بتمهل خلف الساق بينما تحافظ على وضع العلاقة والقضبان على الساق. يمكن تشذيب الأحزمة للحصول على تطابق مناسب ويمكن إعادة وضع طرف الحزام إلى الحافة الجديدة من الحزام.

- (5) لتعديل وضع الأحزمة على الساق، اضغط على الزر الرمادي وادخل مجاديف حزام إلى المكان المرغوب على الساق.
- (6) لتعديل الانتشاء والتمدد، ادخل الأزرار الموجودة على حقيبة التعليق إلى أوضاع الانتشاء/التمدد المطلوبة كما هو محدد من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. قد تحتاج لنقل قضيب العلاقة إلى وضع التمدد المطلوب على الحافة الخارجية للعلاقة بالترتيب لتكون قادرًا على نقل زر التمدد.
- (7) لإغلاق العلاقة، انقل قضيب العلاقة إلى الوضع المطلوب على الحافة الخارجية للعلاقة. ادخل علاقة زر الإغلاق الموجودة على قضيب الفخذ في الوضع المغلق لكي ينتقل السهم نحو مركز العلاقة.
- (A) قد تنتهي قضبان العلاقة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق. اثن كل قضيب برفع قضيب الفخذ/بطة الساق بقوة مقابل السطح الصلب واستخدم واضغط باستمرار على العلاقة في الاتجاه المطلوب. اثن كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعلاقة.
- (B) لتسهيل الاستخدام بعد العمليات الجراحية، أو قبل المطابقة المشد قبل عملية الجراحة إذا ذلك كان ممكنًا.
- تعليمات التنظيف:** تغسل يدويًا في ماء بارد مع منظف لطيف. جففه في الهواء فقط، لا تسخنه. يوصى بتنظيف المشد بشكل منتظم. يمكن قص الاسفنج. استشر طبيبك أو المعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالمشد.
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.**
- RX فقط**
- بدون لاتكس**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.