

## :Telescoping Post-Op Knee Braces

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

**دلایل الاستعمال:** تثبيت ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL) والرباط الجانبي الداخلي (MCL) • تثبيت ومجال حركية محمي مرتبط بتصلب الحلالة لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه.

يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

(1) افتح ايزيم كل واحد من أحزمة الدعامة وأخرج الأغلفة الاسفنجية من الدعامة. لف رفادات بطة الساق والفخذ بشكل محكم حول الساق واربطها بشكل أمامي (مقدمة الساق).

(2) عدّل طول القضيبي بواسطة الزر الرمادي وإدخال قضيبي التمديد للطول المرغوب. ينبغي أن يتمدد الزر للأعلى كلياً بعد التعديل لضمان وضعية أمنة و يجب أن يكون القضيبيان متساويين في الطول. يمكن تمديد قضيبان ما بعد العملية لطول الساق الكامل حتى الكاحل.

(3) ضع تركيب قضيبي الجهة الجانبية (الخارجي) واضغطه في مكانه بحيث تتراصف المفصلة مع الرضفة (عظمة الركبة) وخط وسط الساق. يشكل الكعب الوحشي والمردور الأكبر في الورك نقاطاً مرجعية جيدة للتراصف مع خط الوسط. كرّر مع القضيبي الإنسي (الداخلي). تأكد من أن طول المفصلة الإنسية والجانبية متساويين.

(4) عدّل طول الأحزمة حسب الساق، وبعد ذلك أقل الأيزيم ابتداء بأقرب حزامين للركبة. شدّ الأحزمة لإحكامها في مكان. اربط الأيزيم والأحزمة المتبقية.









(5) خلع سهل كقطعة واحدة، فكّ الأيزيم وافتح الرفائد الاسفنجية. وهكذا يمكن خلع الدعامة ولبسها ثانية كوحدة واحدة.

### تعليمات تعديل القضيبي

يمكن تعديل طول قضيبي الفخذ وقضيبي بطة ليتناسب مع طول الساق. عدّل طول القضيبي بواسطة الزر الرمادي وإدخال قضيبي التمديد للطول المرغوب. ينبغي أن يتمدد الزر للأعلى كلياً بعد التعديل لضمان وضعية أمنة و يجب أن يكون القضيبيان متساويين في الطول. قد تكون هناك حاجة إلى إعادة التعديل من أجل راحة الكعب. مكن إزالة قضيبي التمديد بواسطة تحريك القضيبي بحذر للخارج كلياً.

### تعليمات لتعديل المفصلة

**مفصلة A: HINGE** اضغط لأسفل، حرك للخارج، وارفع سقاطة الأمان بالمفصلة للأعلى. قم بتدوير الغطاء حتى ينكشف مسمار الثني أو التمديد. أخرج المسمار وضعه في وضعية الدرجة المطلوبة. قم بتدوير

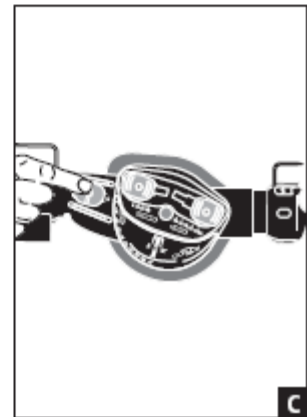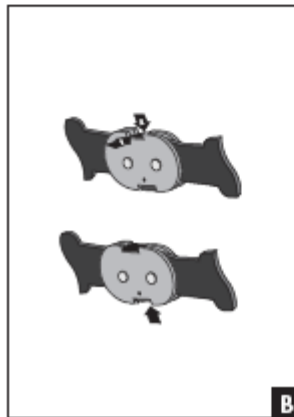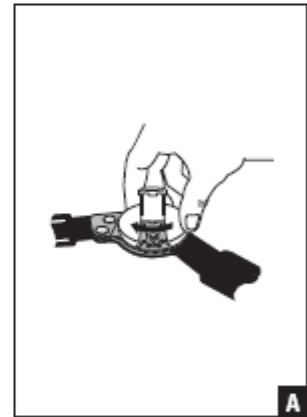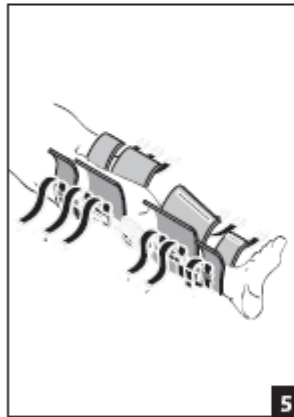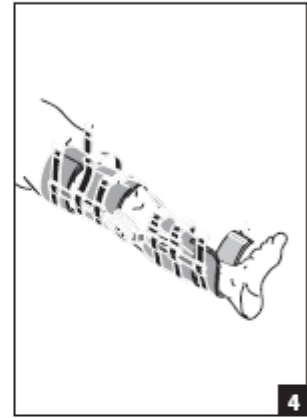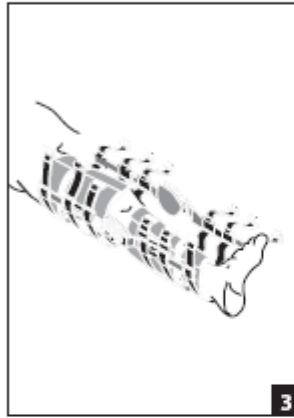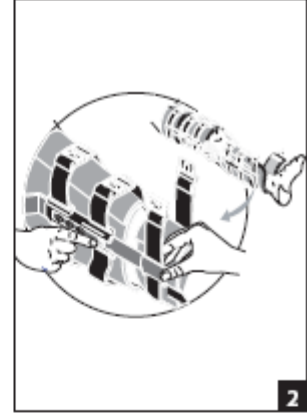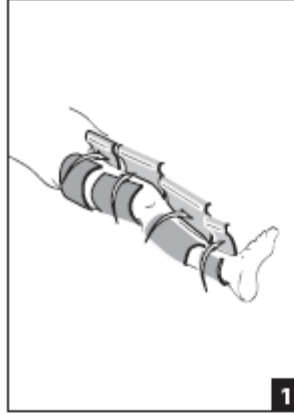

الغطاء حتى تتجاوز سقاطة الأمان المسمار وأرجع السقاطة لمكانها.  
**مفصلة B: ELS:** لتشغيل المفصلة، ينبغي مَدّ الساق بالكامل. اضغط على الزر الذي على ظهر المفصلة نحو الداخل ومن ثم إلى الأمام. لفتح المفصلة، اضغط على الزر الذي على الجزء الأمامي من المفصلة نحو الداخل ومن ثم للخلف.  
**مفصلة C: TROM:** لتعديل الثني والتمديد، اضغط الزر لداخل ثم عدّل اللسان للوضع المرغوب. قد تكون هناك حاجة لتحريك قضيب المفصلة لإتاحة التعديل. لإغلاق العلاقة، عدّل إلى الوضع المطلوب، اضغط على الزر وادخل الشريط في مكان الحلقة. ينبغي أن يتمدد الزر للأعلى كلياً بعد تعديل زاوية الثني والتمديد أو إدخال القفل لضمان وضعية آمنة.  
**الاستعمال والعناية**

- قد تنتهي قضبان العلاقة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق.
  - تغسل البطانات الإسفنجية يدوياً في ماء بارد مع منظف لطيف. جففها في الهواء فقط، لا تسخنها.
  - يمكن قص الاسفنج.
- استشر طبيبك أو المُعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.  
**تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

**لمريض واحد كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

**تنبيه:** يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.