


מייצבי ברך טלסקופיים לאחר ניתוח:

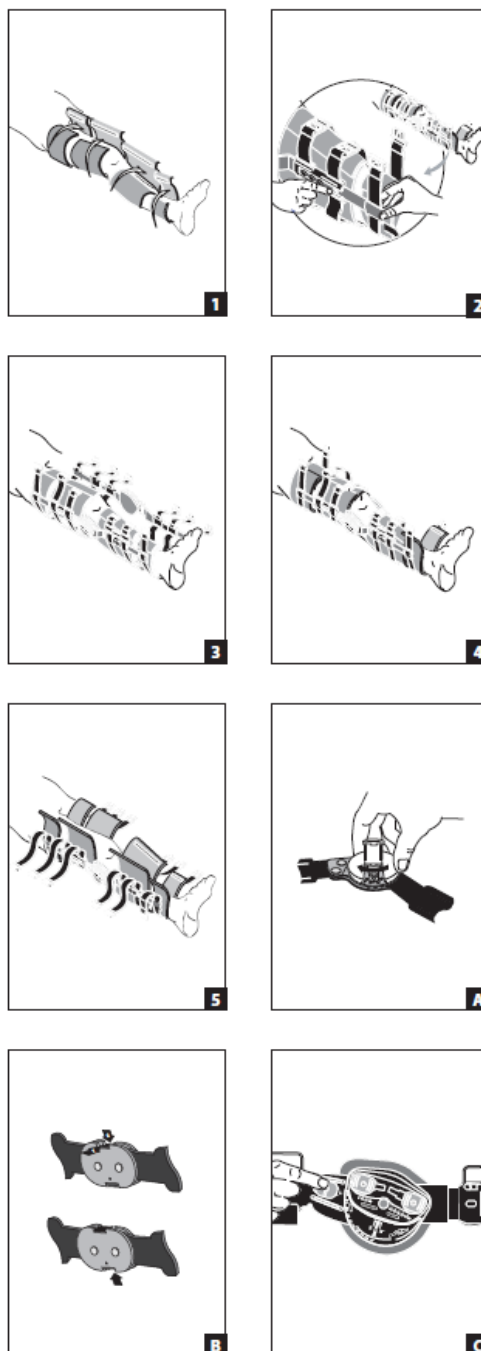

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: מניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לניתוחים של הרצועה הצולבת הקדמית (ACL),

הרצועה הצולבת האחורית (PCL), הרצועה הקולטרלית הצדית (LCL) והרצועה הקולטרלית האמצעית (MCL) • מניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לתיקונים של המניסקוס

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל.

איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

- 1) שחרר את האבזם שעל כל רצועה של המייצב והסר את עטיפות הספוג מהמייצב. כרוך את רפידות הספוג לשוק ולירך באופן צמוד סביב הרגל וחבר מלפנים (בקדמת הרגל).
- 2) כוונן את אורך המוטות בלחיצה על הכפתור האפור והחלקת מוט ההארכה לאורך הרצוי. הכפתור צריך לפנות מעלה לחלוטין לאחר ההתאמה כדי להבטיח מצב מאובטח, ושני המוטות חייבים להיות זהים באורכם. המוטות לאחר-ניתוח ניתנים להארכה לאורך המלא של הרגל עד הקרסול.
- 3) מקם את מכלול מוטות הצד הרוחביים (החיצוניים), ויישר את הציר מול פיקת הברך וקו האמצע של הרגל. הפטישון החיצוני והטרוכנטר הגדול באגן הירכיים משמשים נקודות התייחסות טובות ליישור לפי קו האמצע. חזור על כך עבור המוט המדיאלי (הפנימי). ודא שהגובה המדיאלי והרוחבי של הציר שווים.
- 4) התאם את אורך הרצועות לרגל, ולאחר מכן הדק את האבזמים החל משתי הרצועות הקרובות ביותר לברך. הדק את הרצועות כדי לאבטחן במקומן. הדק את שאר האבזמים והרצועות.
- 5) להסרה קלה כיחידה אחת, שחרר את האבזמים ופתח את רפידות הספוג. לאחר מכן ניתן להסיר את המייצב ולהניחו מחדש כיחידה אחת.

הוראות לכוונן המוטות

ניתן לכוונן את אורך מוטות הירך והשוק כדי שיתאימו לאורך הרגל. כוונן את אורך המוטות בלחיצה על הכפתור האפור והחלקת מוט ההארכה לאורך הרצוי. הכפתור צריך לפנות מעלה לחלוטין לאחר ההתאמה כדי להבטיח מצב מאובטח, ושני המוטות חייבים להיות זהים באורכם. לנוחות הקרסול, ייתכן שיהיה צורך לכוונן מחדש את המוטות. ניתן להסיר את מוט ההארכה בהחלקת המוט בזהירות החוצה לחלוטין.

הוראות לכוונן הציר

ציר IROM: א לחץ את בריח הביטחון של הציר כלפי מטה, החלק אותו החוצה והרם אותו. סובב את הכיסוי עד חשיפת פין הכיפוף או הפישוט הרצוי. הוצא את הפין והכנס אותו למיקום המתאים, בהתאם לדרגת הכוונן הרצויה. סובב את הכיסוי כך שבריח הביטחון יעבור את הפין, וסגור חזרה את הבריח.

ציר ELS: ב כדי לנעול את הציר, על הרגל להיות פשוטה לחלוטין. לחץ על הכפתור בגב הציר פנימה ואז קדימה. כדי לשחרר את הציר, לחץ על הכפתור בחזית הציר פנימה ואז אחורה.

ציר TROM: ג כדי לכוונן כפיפה ופשיטה, לחץ פנימה את הכפתור ואז התאם את הלשונית למיקום הרצוי. ייתכן שיהיה צורך להזיז את זרוע הציר כדי לאפשר כוונן. כדי לנעול את הציר, כוון למיקום הרצוי, לחץ על הכפתור והכנס את הלשונית למצב נעילה.

הערה: הכפתור צריך לפנות כלפי מעלה לחלוטין לאחר התאמת זווית הכפיפה והפישוט או הכנסת המנעול כדי להבטיח מצב מאובטח.

שימוש וניקוי

- זרועות הצירים עשויות להיות כפופות להוספת קווי מתאר של וארוס או ולגוס.
- יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום.
- ניתן לחתוך את כל הספוגים.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.