

مشد الركبة TRIZONE™



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- التثبيت العام
- التحفيز الذاتي والتحفيز العصبي من خلال الضغط
- للاستخدام بعد عملية جراحية أو بعد صدمة، التهاب مزمن في الأنسجة الرخوة بمفصل الركبة
- ألم مرتبط بالحمل في الركبة

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

امسك حواف الكم من الفتحة الأوسع. اسحب الكم فوق الركبة.

المكونات:

البوليستر، السيليكون، الخيزران، السبانديكس

التركيب

البوليستر، السيليكون، الخيزران، السبانديكس

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي



معدّ للاستخدام على مريض واحد

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.