

TRIZONE KNEE™



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- ייצוב כללי
- גירוי פרופריוצפטיבי ונירומוסקולרי באמצעות לחץ
- שימוש לאחר ניתוח או לאחר טראומה, דלקת כרונית של הרקמה הרכה של מפרק הברך
- כאבי ברך הקשורים לעומס

התוויות נגד

- אין

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. משוך את הברכית על הברך.

הרכב:

פוליאסטר, סיליקון, במבוק, ספנדקס

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.