

# TRU-PULL<sup>®</sup> LITE



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות

- עבור סובלוקסציה של הפיקה, שחיקה, ודלקת מפרקים של הפיקה קלות עד בינוניות, ויציבות אמצעית/צדית.

## התוויות נגד

- אין

## אזהרות

לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש צוות רפואי.

#### **אזהרות**

לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש צוות רפואי.

#### **הוראות ניקוי**

יש לנקות את התמיכה במים וסבון במידת הצורך או באופן סדיר להחזרת התחושה ה"דביקה".

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

#### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.