

# TRU-PULL™ ADVANCED SYSTEM PATELLOFEMORAL SLEEVE

تعليمات الاستخدام

قبل استخدام المشد، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن.

الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الدعامة بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: لخلع و/أو خلع جزئي بالرضفة (عظم الركبة)


**A** ضع الكمّ على الساق. ضع فتحة الرضفة على عظمة الركبة. (الشكل 1)

هناك نوعان من الدعم للاختيار، عليك اختيار الدعم المريح أكثر. ضع الدعم بشكل صحيح على الحد الإنسيبي أو الجانبي للرضفة بشكل يلائم دلالة الاستعمال.


**B** خذ الحزام السفلي ولفه حول بطة الساق واربط الحلقة بالكم. (الشكل 2 والشكل 3)

**C** خذ الحزام العلوي ولفه حول بالفخذ واربط الحلقة بالكم. (الشكل 2 والشكل 3)


**D** عدّ التوتر على الرضفة بواسطة شدّ الأحزمة أكثر حول الفخذ وبطة الساق.

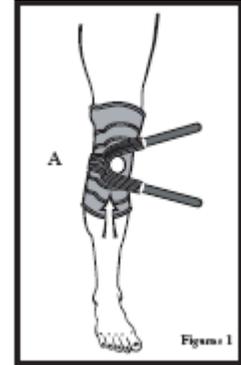

الشكل 1

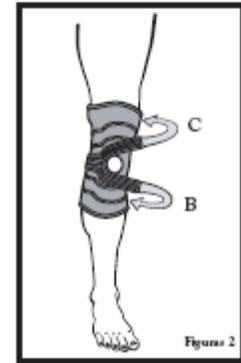

الشكل 2

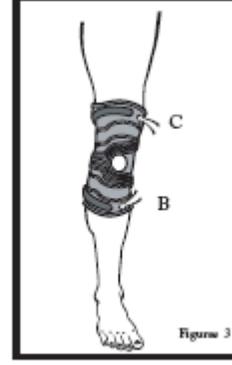

الشكل 3

### الاستعمال والعناية

- اغسلها بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، اشطفه جيّدًا. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيّدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج أو تلف المواد.
- ينبغي عدم استخدام الدعامة إذا فشلت في توفير تخفيف أو إذا كانت بالية بشكل زائد.
- المنتج معدّ لاستعمالات متعددة من قبل مريض واحد.
- نوصي ونؤيد تنظيف الدعامة.
- غير مناسبة للاستخدام في الرياضات المائية.
- ينبغي فحص المنتج للاهتراء قبل كل استعمال.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.