


Tru-Pull Advance Attachment

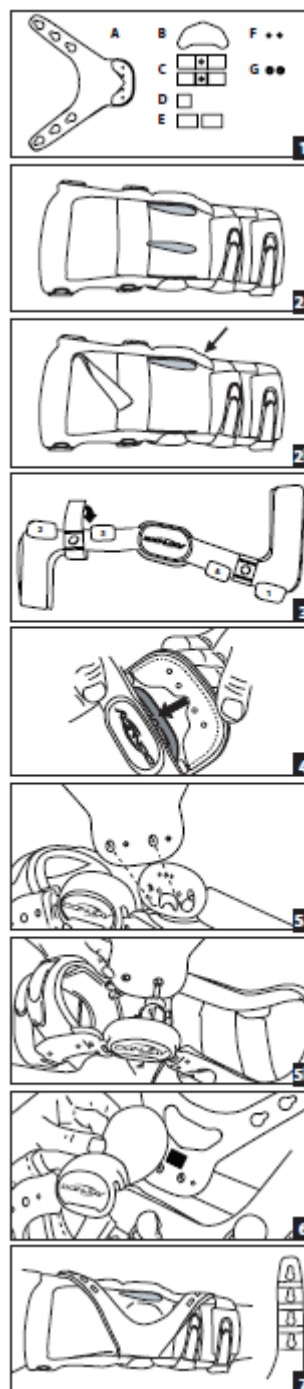

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: לתמיכה נוספת ושיכוך כאב סימפטומטי של הפרעות בתפקוד פיקת הברך, לרבות שחיקה צדית, סובלוקסציה/נקע ודלקת בגידי הפיקה.

התוויות נגד: סובלוקסציה/נקע אמצעיים.

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי. לפני השימוש, בדוק שאין במוצר סימני בלאי.

אין להשתמש אם קיים בלאי ניכר. אין להשתמש במוצר זה בסביבה רעילה או קורוזיבית. מומלץ לנקות את המוצר באופן סדיר.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

הוראות יישום:

- 1) חלקים: (א) Tru-Pull Advanced Attachment אחד, (ב) תמיכה אחת, (ג) שני כפתורים, (ד) טלאי דו-צדדי אחד, (ה) שני טלאי הדבקה, (ו) שני ברגים, (ז) שתי דיסקות.
2א) הסרה: הסר את רפידת הציר הצדית (הצד החיצוני של המייצב).
- 2ב) ריפוד מסגרת הירך והשוק: קלף את ריפוד מסגרת הירך והשוק שבצד הפנימי של הצד המייצב.
הערה: החץ מציין את הבליטה הצדית (כיפוף בחלק הפנימי של המייצב).
- 3) קלף את מדבקת הגב וחבר את הכפתור למסגרת בערך באמצע בין הרצועות בחלקי הירך והשוק בצד האמצעי של המייצב.
הערה: על הכפתור לפנות אל מחוץ למסגרת. ראה תרשים 3.
- חבר (2) כפתורים: חבר כפתורים לכנפי כפתור עטיפת המייצב בחוזקה סביב המסגרת, כך שייפגשו או יחפפו בצד הפנימי של המייצב מתחת לריפוד כמוצג בתרשים 3.
חיבור חוזר: הנח את ריפודי הירך והשוק בחזרה במקומם. הערה:
במידת הצורך, הדבק טלאי דביק נוסף כדי להחזיק את הריפוד במקומו
- 4) **עבור צירים סטנדרטיים:** החלק את ה-Tru-Pull Advanced Attachment מעל מעטפת הפלסטיק הקשיחה של הציר (מהחלק האחורי של המייצב לכיוון החזית) אל המקום ממנו הוסרה רפידת הציר.
- 5) **עבור צירי LoPro Fourcepoint:** הנח את הדיסקות והברגים בצד הרך של הכנף הפנימית. על הבורג לחזור קודם דרך הצד הרך ואחר כך דרך יחידת הפלסטיק. הקפד ליישר את החורים של הכנף מעל החורים המתוברגים של הציר. ראה תרשים 5א. לאחר מכן, הברג את הברגים לתוך החורים המתוברגים. ראה תרשים 5ב.
- 6) חיבור חוזר: במקרה הצורך, חבר שנית את שתי רפידות הצירים באמצעות טלאי דו-צדדי כדי להדק אותן ל-Tru-Pull Advanced Attachment כמוצג בתרשים 6.
- הערה: לשיפור הנוחות וההתאמה, ניתן להשתמש בעוביים שונים של רפידות צירים.
יישום: תמיכה לחלק הפנימי של ה-Tru-Pull Advanced Attachment כמוצג, כך שתתאים בהידוק נוח כנגד צד הפיקה.
- 7) יישום: כוונן את המתיחה הרצויה בין החריצים של חורי הכפתורים לכפתורי המסגרת. גזור את עודפי החומר מקצות הרצועות. ראה תרשים 7.
הערה: לגזירת קצות הרצועות, חתוך במספרים בין התפרים.
הוראות ניקוי: נתק את התמיכה מהמייצב.
- יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף את שניהם היטב. יש לייבש באוויר בנפרד. הערה: אם המוצר לא נשטף היטב, שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי בעור או להתפוררות החומר. יש לנקות את התמיכה במים וסבון במידת הצורך או באופן סדיר להחזרת התחושה ה"דביקה".
מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.
נטול לטקס.
- אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
- לתשומת לבך:** למרות המאמץ והשיטות החדשניות הנוקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.