



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: بعد جراحة تصليح الكفة المدورة، بعد إجراءات Bankart الجراحية، جراحة تغيير موضع المحفظة، جراحة حقانية عضدية، خلع/خلع جزئي، إجهاد/تصليح الأنسجة الرخوة.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك. لا تلبس الدعامة أبداً فوق جرح مفتوح.

معلومات حول الاستعمال:

- (1) افصل حزام الكتف وافتح اللوحة الأمامية. ضع الكوع في الحاملة أبعد ما يمكن. اعقد حزام الحاملة عبر حلقة D واربطه بإحكام. (الشكل 1)
- (2) تبتت الحزام على الجزء العلوي من الحاملة. إذا كنت ترغب باستخدام حزام الإبهام، علق الحزام على الجزء الأمامي من الحاملة. (الشكل 1)
- (3) ضع حزام الكتف على الكتف المعاكس. اربط حزام الكتف بالحاملة باستخدام مشبك الفصل السريع. (الشكل 2)
- (4) ضع وسادة على الخصر بالجهة المصابة. اربط الحاملة بالجزء الخارجي من الوسادة، على طول أحزمة الإبريم والحلقة. اربط بالمشبك حزام الخصر بالوسادة وعدل الحزام ليكون مناسباً. ضع الذراع للدوران الداخلي أو الخارجي المرغوب عن طريق تحريك الوسادة إلى الأمام أو إلى الخلف على طول الخصر. (الشكل 3)

:ULTRASLING II AB

(1) ضعها حسب الخطوات 1-3 أعلاه ثم استمر كما يلي:
ضع الوسادة الكبيرة تحت لمنطقة المصابة بزاوية 45 درجة باتجاه الأعلى.
اربط الحمالة بالوسادة، بصفت مع أحزمة الإبزيم والحلقة. لفّ حزام الخصر حول محيط الخصر والوسادة واربطه.
ملاحظة: يمكن لفّ الوسادة رأساً على عقب لتكوين زاوية تبعيد مقدارها 60 درجة.
تعليمات التنظيف:
اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء.
ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
يمكن قصّ حزام الخصر والكتف بواسطة إزالة لسان Y (بالنماذج Ultrasling II/III فقط).
كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

مخصص للاستخدام لمرضى واحد فقط.

منتج RX

بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.