


UltraSling IV ER

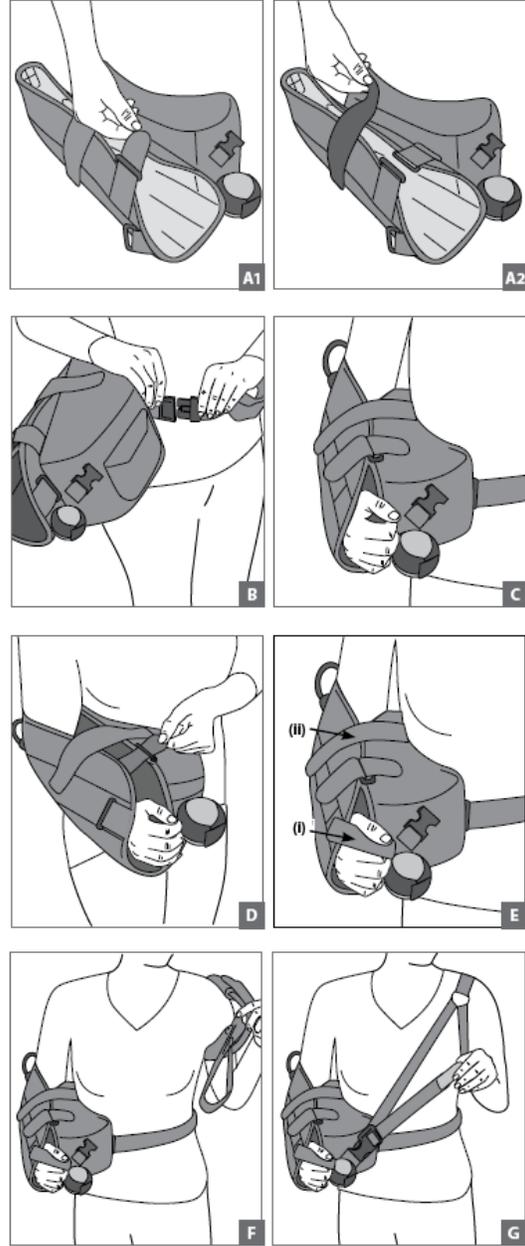

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال: لبروتوكولات متعلقة بالتنبيب بدوران خارجي • خلع/خلع جزئي حقتي عضدي • تغيير موضع المحفظة
• للاستعمال بعد تثبيت الكتف الخلفي • بعد إجراءات Bankart الجراحية • تحديد الموضع بأعقاب عملية جراحية بعد تحرير تقلص شديد
بالمحفظة الأمامية • إجهاد/تصلب الأنسجة الرخوة
موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال: لضمان توافق مناسب، ينبغي ملائمة حجم المنتج للمريض قبل العملية الجراحية. يتم شحن المنتج مع أحزمة وحمالة مشكلة لتلائم العلاج بعد عملية جراحية إعادة التأهيل بالكتف/الذراع اليمنى. يجب أن يكون رمز اليمين (R) على وسادة موجهًا للأعلى. للتحويل للكتف/الذراع اليسرى، افصل الحمالة عن وسادة الميعة؛ اقلب الوسادة بحيث يكون مشبك الخصر للأمام ورمز اليسار (L) موجهًا للأعلى؛ اربط الحمالة بالجزء الخارجي من الوسادة بواسطة أشرطة الفيلكرو.

1. حرر حزام الخصر على الوسادة، أشرطة الفيلكرو في موقع المعصم على الجزء الأمامي من الحمالة وحزام الساعد (الشكل A).
2. ضع الوسادة بمحاذاة الجانب المصاب بمستوى/الورك بينما يكون الكوع ثابتاً بزاوية 90 درجة. ضع الوسادة بحيث يكون الخط بأعلى الوسادة موازياً للجزء الأمامي من جسمك (إذا كنت تقف على طاولة، فيجب أن يكون الخط موازياً للطاولة).
3. اسحب حزام الخصر حول الجزء الخلفي من الخصر وأغلق المشبك على الجزء الأمامي من الوسادة (الشكل B). عدّل حزام الخصر وقصه وفقاً للضرورة من أجل توافق ملائم.
4. ضع الساعد في الحمالة بحيث تكون الذراع أبعد ما يمكن في الحمالة (fig C). تثبت أشرطة الفيلكرو على موقع المعصم من خلال البدء بتثبيت أقرب شريط للوسادة، على الوسادة. مرّر شريط الفيلكرو الخارجي عبر حلقة D الداخلية واربطه بإحكام على الجزء الخارجي من الحمالة (fig D). ضع شريط الشبكة الصغيرة المخصص للإبهام (i) بين الإبهام والسبابة واربطه بإحكام على الحمالة.
5. اربط بإحكام شريط الساعد (ii) بالحمالة والوسادة (الشكل E).
مذ ذراعك الحرة وراء جسمك، وأدخل الذراع عبر حزام الكتف (الشكل F). هذه الحركة مشابهة لوضع حقيبة على الظهر. يجب أن يكون حزام واحد على الكتف غير المصابة (منطقة الترقوة) بينما يكون الحزام الثاني تحت الذراع (الحزام B والحزام C). تثبت طرف المشبك على الحزام A ليرتبط بالقطعة المناسبة على الجزء الأمامي من الوسادة (الشكل G). عدّل كل الأحزمة وقصها من أجل توافق ملائم وذلك بواسطة إزالة لسان-Y على طرف الأحزمة، قص للطول المناسب، أرجع لسان Y.
للاستعمال في غرفة العمليات: نفذ بالكامل خطوات الاستعمال 1-4 بحيث يتبعها ما يلي:
حرّر طرفاً واحداً من حزام الإبط (تحت الذراع). هذا الحزام هو حزام C للذراع اليمنى أو الذراع B للذراع اليسرى. اسحب حزام الكتف (الحزام A) فوق وحول منطقة الرقبة وشّد حزام الإبط تحت الذراع ومرره عبر حلقة O المسطحة. تثبت الحزام مع عروة Velcro.
6. عدّل كل الأحزمة لتحقيق التثبيت الكافي للكتف المصابة. أخرج السنة Y على أطراف الحزام وقص حسب الحاجة. استبدل عروات-Y وثبت الأحزمة.
7. لممارسة الرياضة والتأهيل فك شريط الفيلكرو الخارجي بمنطقة المعصم لزيادة مجال الحركة.
ملاحظة: ينبغي وضع حلقات O المسطحة الكبيرة التي على الجزء الأمامي (الصدر/ عظم الترقوة) وعلى الجزء الخلفي (العظم الكتفي) بحيث توفر أكبر قدر من الراحة للمريض.
إمكانية التحضير التنازلي للتأهيل: لاستخدام UltraSling IV ER بدون الوسادة المبعدة، أفصل حزام الخصر عن الوسادة، مرر حزام الخصر عبر حلقات D الصغيرة الموجودة على الجزء الأمامي والخلفي من الحمالة. تثبت الحزام حول الخصر باستخدام عروات Velcro. شدّب كما هو مطلوب.
الاستعمال والعناية: اغسلها باليد بمياه باردة درجة حرارتها 30 درجة مئوية (85 فهرنهايت). علقها حتى تجف.



كفالة: ستقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

بدون لاتكس

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد

محتويات المواد: نايلون، بوليستر، الياف لدنة، بولي يورثان

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.