


UltraSling IV ER

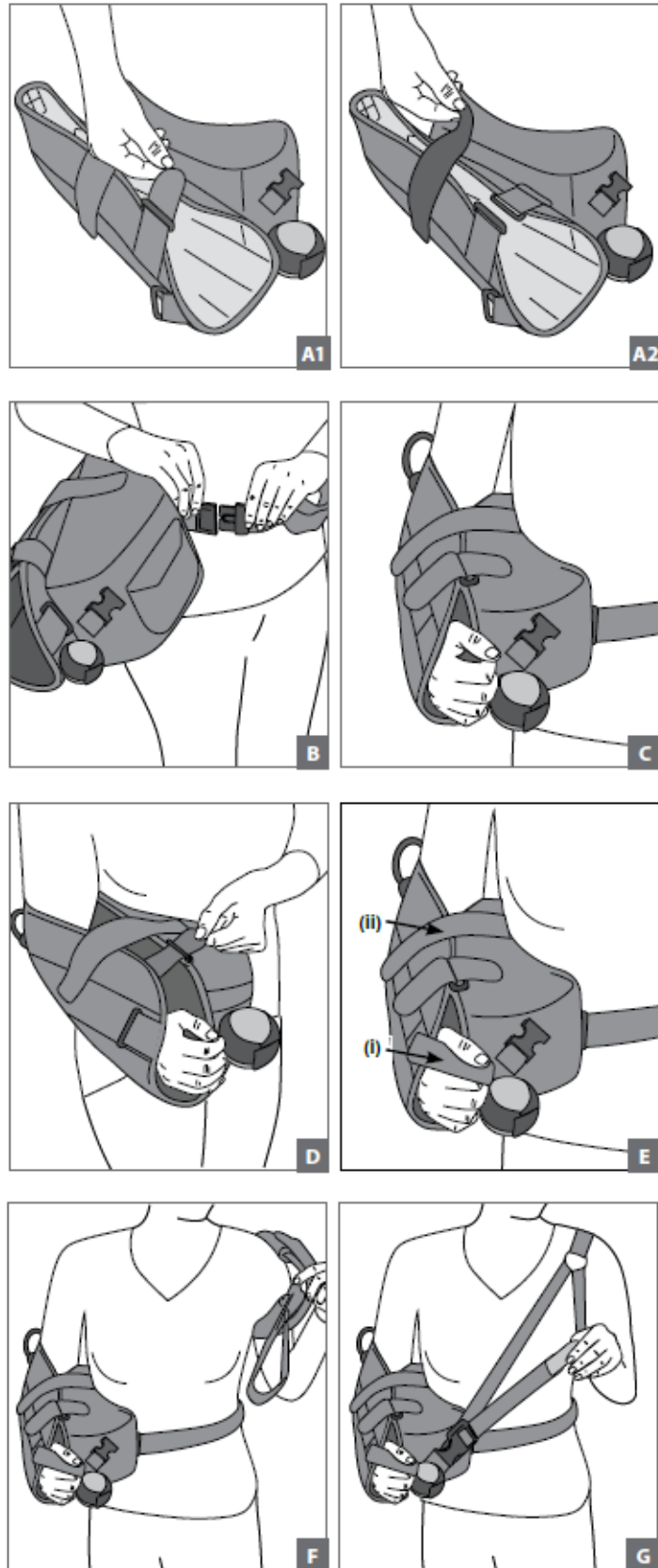

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים חיוניים לתפקודו התקין של האביזר.

שימוש מיועד/התוויות: עבור פרוטוקולים הקשורים במניעת תזוזה בסיבוב חיצוני • נקע/סובלוקסציה של מפרק הכתף • יציבות

קופסית הכתף • שימוש לאחר ייצובי כתף אחורית • הליכי בנקרט לאחר ניתוח • מיקום לאחר ניתוח, לאחר שחרור התכווצות חמורה של הקופסית הקדמית • מתיחות/תיקונים של רקמה רכה

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום: כדי להבטיח התאמה נאותה, יש להתאים את מידת המוצר למטופל לפני הניתוח. המוצר נשלח כשהרצועות והמתלה מותאמים לטיפול לאחר ניתוח או שיקום של הכתף/הזרוע הימנית. הסמל עבור יד ימין (R) שעל הכרית צריך לפנות כלפי מעלה. כדי להמיר את המתלה עבור הכתף/הזרוע השמאלית, נתק אותו מכרית ההצדדה; הפוך את הכרית כך שאבזם המותנניים יהיה מלפנים והסמל עבור יד שמאל (L) יפנה מעלה; חבר את המתלה לצד החיצוני של הכרית בעזרת רצועות הצמדן.

1. שחרר את חגורת המותנניים שעל הכרית, את רצועות הצמדן במיקום של שורש כף היד בקדמת המתלה ואת רצועת האמה (תרשים א').
2. ישר את הכרית בצד הפגוע בגובה המותנניים/האגן כאשר המרפק מקובע ב-90°. הנח את הכרית כך שהקו שעל גב הכרית יהיה מקביל לחזית גופך (אם אתה עומד ליד שולחן, הקו צריך להיות מקביל לשולחן).
3. הבא את רצועת המותנניים מהכרית וסביב החלק האחורי של המותנניים וחבר את האבזם בקדמת הכרית (תרשים ב'). להתאמה נכונה, כוונן את רצועת המותנניים וקצר לפי הצורך.
4. הנח את האמה במתלה כשהזרוע נמצאת אחורנית ככל האפשר בתוך המתלה (תרשים ג'). סגור את רצועות הצמדן במיקום של שורש כף היד, ראשית בעיגון הרצועה הקרובה ביותר לכרית, על הכרית. השחל את רצועת הצמדן החיצונית דרך טבעת ה-D הפנימית והדק את הרצועה בצד החיצוני של המתלה (תרשים ד'). הנח את רצועת הרשת הקטנה לבוהן (i) בין הבוהן לאצבע המורה והדק אותה על המתלה. הצמד את רצועת האמה (ii) למתלה ולכרית (תרשים ה').
5. שלח את הזרוע החופשית שלך אל מאחורי גופך והכנס את היד דרך רצועת הכתף (תרשים ו'). תנועה זו דומה ללבישת תרמיל גב. רצועה אחת צריכה לעבור מעל הכתף שאינה פגועה (באזור עצם הבריח) והשנייה מתחת לזרוע (רצועות ב' ו-ג'). סגור את קצה התפס שעל רצועה A כדי שיתחבר בחזית הכרית (תרשים ז'). להתאמה נאותה, כוונן וקצר את כל הרצועות על ידי הסרת לשוניות ה-Y שבקצה הרצועות, גזירה לאורך המתאים והחזרת לשוניות ה-Y.

ליישום בחדר ניתוח: השלם את שלבי היישום 1-4 ולאחר מכן:

6. שחרר קצה אחד של רצועת בית השחי. רצועה זו היא רצועה C עבור הזרוע הימנית או רצועה B עבור הזרוע השמאלית. העבר את רצועת הכתף מעל וסביב אזור הצוואר ואת רצועת בית השחי מתחת לזרוע והשחל דרך טבעת ה-O. סגור את הרצועה בעזרת לשוניות הצמדן (ולקרו).
 7. כוונן את כל הרצועות לייצוב הולם של הכתף הפגועה. הסר את לשוניות ה-Y שבקצות הרצועות וגזור בהתאם לצורך. החזר את לשוניות ה-Y למקומן והדק את הרצועות.
 7. לתרגול ושיקום יש לנתק את רצועת הצמדן החיצונית שבאזור שורש כף היד כדי להגדיל את טווח התנועה.
- הערה: לנוחות המרבית למטופל, יש למקם את טבעות ה-O השטוחות הגדולות בחזית (על החזה/עצם הבריח) ומאחור (על עצם השכם).

אפשרות התערבות פחותה בשיקום: לשימוש ב-UltraSling IV ER ללא כרית ההצדדה, הסר את רצועת המותניים מהכרית, השחל את רצועת המותניים דרך טבעות ה-D הקטנות הנמצאות בחלקו הקדמי והאחורי של המתלה. הדק את הרצועה סביב המותניים בעזרת לשוניות הצמדן (ולקרו). גזור לפי הצורך.

שימוש וניקוי: יש לכבס ביד במים קרים בטמפרטורה של 30°C . יש לייבש בתלייה.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

נטול לטקס

מוצר זה מיועד לשימוש של מטופל יחיד

תכולת החומרים: ניילון, פוליאסטר, ספנדקס, פוליאוריתן

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.