


## UltraSling® IV and UltraSling® IV AB

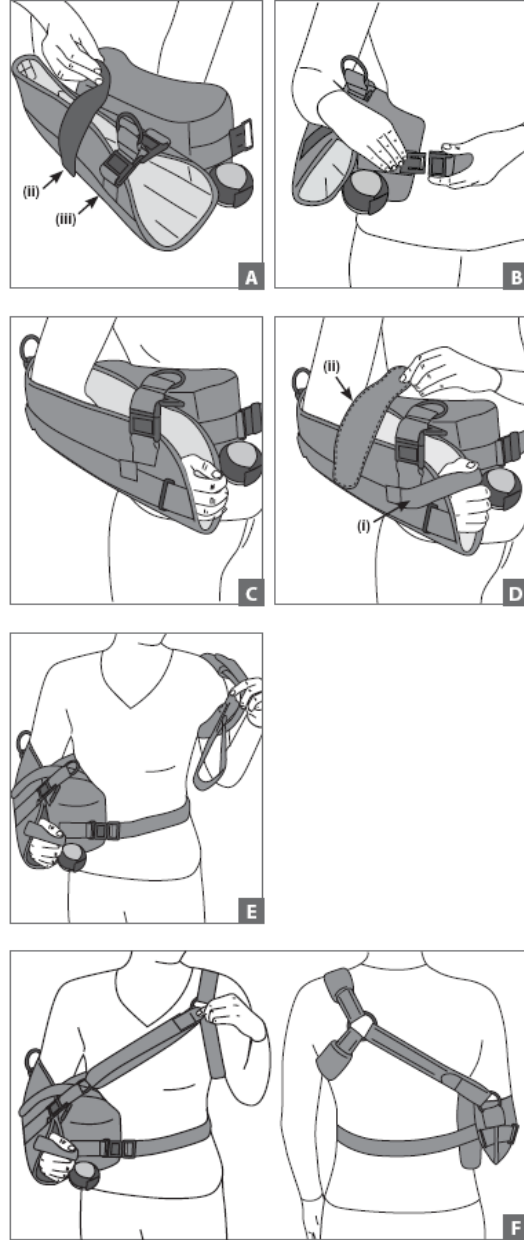

قبل استعمال الجهاز، يرجى أن تقرأ التعليمات التالية بالكامل وبغناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: بعد عمليات إصلاح الكفة المدورة، إجراءات بانكارت، وتحولات كابسولار، التفكك الحفاني العضدي/الخلع جزئي، إلتواءات/إصلاحات الأنسجة اللينة.

موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم أو تورم أو تغييرات بالإحساس أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

للتحقق من المتطابق المناسب، يجب أن يتناسب حجم المنتج مع حجم المريض قبل العملية. يتم شحن المنتج مع مميزات الحزام والحمالة للكتف/الذراع الأيمن. للتحويل من أجل رفع الكتف/الذراع، افصل الحمالة من وسادة الخطاف؛ غطي الوسادة فوق إبريم الخصر من الأمام؛ اربط الحمالة لخارج الوسادة مع حزام Velcro.

## ULTRASLING IV

1. فك حزام الخصر على الوسادة وحزام الساعد (2) على الحمالة. فك حزام الكتف (3) بفك الأباريم سريعة الفك في مقدمة الحمالة (الشكل أ).
2. حاذي الوسادة على الجانب المجروح عند مستوى الخصر/الورك مع الكوع المثبت على 90 درجة. يجب وضع النهاية الضيقة للوسادة إلى خلف الساعد/الكوع. احضر حزام الخصر للخلف واربطه للإبريم في مقدمة الوسادة (الشكل ب). عدل حزام الخصر وشدبه كما يلزم الأمر للتطابق المناسب.
3. ضع الساعد في الحمالة مع الذراع للخلف بعيدة قدر الإمكان في الحمالة (الشكل ج). ثبت حزام الإبهام (1) بين الإبهام والسبابة في مقدمة الحمالة. ثبت حزام الساعد (2) إلى الحمالة والوسادة (الشكل د).
4. باستخدام ذراعك الحر، اوصل إلى خلف جسمك وادخل الذراع من خلال حزامي الكتف ب و ج (الشكل هـ). هذه الحركة مشابهة لليس حقيبة الظهر. يجب أن يكون حزام واحد فوق الكتف غير المصاب (منطقة الترقوة) والآخر تحت الذراع (الحزامين ب و ج). عدل وشدب كلا الحزامين لتحصل على تطابق مناسب.
5. عدل حزام الكتف أ من خلال الحلقة-O على الحمالة من الأمام. عدل جميع الأحزمة للحصول على الاستقرار الكافي للكتف المصاب (الشكل و). انزع عروات-Y على نهايات الحزام وشدبه كما هو يلزم. استبدل عروات-Y وثبت الأحزمة.

## ULTRASLING IV AB

1. فك حزام الخصر على الوسادة وحزام الساعد (2) على الحمالة. فك حزام الكتف (3) بفك الأباريم سريعة الفك في مقدمة الحمالة (الشكل أ).
  2. ضع الوسادة الكبيرة تحت لمنطقة المصاية بزواوية 45 درجة باتجاه الأعلى. اربط الحمالة إلى الوسادة. حاذ حزام الخصر والورك واربطهما للإبريم في مقدمة الوسادة (الشكل ب). عدل حزام الخصر وشدبه كما يلزم الأمر للتطابق المناسب.
  3. ضع الساعد في الحمالة مع الذراع للخلف بعيدة قدر الإمكان في الحمالة (الشكل ج). ثبت حزام الإبهام (1) بين الإبهام والسبابة في مقدمة الحمالة. ثبت حزام الساعد (2) إلى الحمالة والوسادة (الشكل د).
  4. باستخدام ذراعك الحر، اوصل إلى خلف جسمك وادخل الذراع من خلال حزامي الكتف ب و ج (الشكل هـ). هذه الحركة مشابهة لليس حقيبة الظهر. يجب أن يكون حزام واحد فوق الكتف غير المصاب (منطقة الترقوة) والآخر تحت الذراع (الحزامين ب و ج). عدل وشدب كلا الحزامين لتحصل على تطابق مناسب.
  5. عدل حزام الكتف أ من خلال الحلقة-O على الحمالة من الأمام. عدل جميع الأحزمة للحصول على الاستقرار الكافي للكتف المصاب (الشكل و). انزع عروات-Y على نهايات الحزام وشدبه كما هو يلزم. استبدل عروات-Y وثبت الأحزمة.
- د. O.R. الاستخدام:** أكمل خطوات الاستخدام من 1 إلى 3 باتباع ما يلي: فك نهاية طرف الحزام المساعد (ملاحظة: يمكن التخلص من الحزام المساعد حسب الرغبة. الحزام المساعد هو الحزام ج للذراع الأيمن والحزام ب للذراع الأيسر. احضر حزام الكتف فوق الكتف غير المصاب. اربط الأباريم سريعة الفك إلى الحمالة. احضر الحزام المساعد (تحت الإبط) من تحت الذراع وادخله من خلال الحلقة-O المسطحة. ثبت الحزام مع عروة Velcro.

ملاحظة: ينبغي وضع حلقات O المسطحة الكبيرة الموجودة على الجزء الأمامي (الصدر/ عظم الترقوة) وعلى الجزء الخلفي (العظم الكتفي) بحيث توفر أكبر قدر من الراحة للمريض.

**إعادة التأهيل:** لاستخدام التصوير بالأشعة السينية بدون وسادة الخطاف، انزع حزام الخصر من الأمام الخلف. ثم ادخل حزام الخصر من خلال الحلقة-D الصغيرة الموجودة على الجانب الأمامي والخلفي من بطانة الحمالة. ثبت الحزام حول الخصر باستخدام عروات Velcro. شدب كما هو مطلوب.

**الاستعمال والعناية:** تغسل يدويًا في ماء بارد وبدرجة حرارة 30 درجة مئوية/85 درجة فهرنهايت. تجفف بنشرها على الحبل.



**كفالة:** بموجب كفالة DJO، LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**بدون لاتكس**

**هذا المنتج معد لاستخدام مريض واحد فقط.**

**المحتويات المادية:** النايلون، البولستر، السبانديكس، البولي يوريثين

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن بأنه سيتم وقاية الإصابة باستخدام هذا المنتج.