

## Universal Neoprene Wrist Support

قبل الاستعمال، يرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل وبغناية.

الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل أداء سليم.

دلائل الاستعمال: • تثبيت المعصم • متلازمة النفق الرسغي

أ يتم شحن دعامة المعصم الشاملة بهيئة معصم اليد اليسرى. للتحويل من هيئة اليسار إلى هيئة اليمين، أخرج المسند والغلاف من الدعامة. أرجع المسند والغلاف إلى مركز الدعامة.

ب ضع الإبهام في فتحة الإبهام الجانبية.

ت يجب أن يكون المسند على راحة اليد بخط واحد مع الذراع.

ث لفت الأزرمة واربطها بإحكام لتوافق مشدود ولكنه مريح.

### الاستعمال والعناية

• قبل الغسيل، أخرج المسند والغلاف من الدعامة. اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء.

ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي تهيجاً بالجلد أو تلف المواد.

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**تحذير:** ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

**تحذير:** إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.