

הוראות יישום לתומך ניאופרן אוניברסלי לשורש כף היד

לפני יישום התומך יש לקרוא בקפידה הוראות אלה במלואן.

התאמה ויישום נכונים חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: • מניעת תזוזה של שורש כף היד • תסמונת התעלה הקרפלית

א תומך שורש כף היד האוניברסלי נשלח בתצורת שורש כף יד שמאל. להמרה מתצורה שמאלית לימנית, הסר את פס המתכת והנרתיק מהתומך. החזר את פס המתכת והנרתיק למרכז התומך.

ב הכנס את האגודל לחריץ האגודל הצדדי.

ג פס המתכת צריך לנוח על כף היד ולהיות בקו אחד עם הזרוע.

ד כרוך והדק את הרצועות עד שתחוש שהתומך צמוד אך נוח.

שימוש וניקוי

- לפני הכיבוס, הסר את הנרתיק ואת פס המתכת מהתומך. יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: אם האביזר לא נשטף היטב, שאריות סבון עלולות לגרום לגירוי בעור ולהתפוררות החומר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.