



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: للتنبيت بعد عملية جراحية

- بعد تجبير كسر
- التواء/إجهاد المعصم.
- (A) أدخل اليد والمعصم لداخل الجبيرة بحيث يكون الإبهام بالفتحة كما هو مبين. (الشكل 1)
- (B) ينبغي أن يتراصف مسند راحة اليد والظهري مع الذراع. يمكن تغيير مكان المسند الظهري/الحزام لتحقيق التراصف الصحيح.
- (C) اربط الأحزمة بإحكام بحيث تبدأ من الإبهام (الشكل 2) وتستمر بأعلى الذراع (الشكل 3).

يجب أن تكون الأحزمة مشدودة، ولكن ألا تكون ضيقة.

الاستعمال والعناية

- اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيدًا. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي تهيجًا بالجلد أو تلف المواد.
- مساند الألومنيوم طيعة ويمكن تشكيلها لمتطلبات محددة.
- يمكن قص مادة الحزام الزائدة.

كفالة: ستقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.
لاستخدام مريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.