

Wrist Supports

العربية

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

دلائل الاستعمال: متلازمة النفق الرسغي •

تثبيت المعصم.

(A) ضع اليد داخل الجبيرة بحيث يكون الإبهام بالفتحة الجانبية. يجب أن يكون المسند على راحة اليد وبخط واحد مع الذراع. لسلامة المعصم فقط

يجب أن يبقى المسند فوق منطقة النفق الرسغي. يجب أن تكون الغرزة الأفقية التي على غلاف المسند فوق أساس راحة اليد قبل إغلاق دعامة المعصم بإحكام.

(B) لف وثبت السدادات. للدعامة مع حلقات D، مرر الأحزمة عبر حلقات D وأحكام واربطها بإحكام. (C) يجب أن تكون الدعامة مشدودة ولكنها مريحة.

الاستعمال والعناية: اغسلها باليد بمياه باردة مع صابون خفيف، اشطفها جيداً. نشفها بالهواء ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

لاستخدام مريض واحد فقط.

بدون لاتكس