

תומכים לשורש כף היד

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: תסמונת התעלה הקרפלית •

מניעת תזוזה של שורש כף היד.

(א) הנח את היד בסד המקבע כשהאגודל בחריץ הצד. פס המתכת צריך לנוח על כף היד ולהיות בקו אחד עם הזרוע.

עבור תומך ביטחון לשורש כף היד בלבד

על פס התמיכה לנוח מעל אזור התעלה הקרפלית. התפר האופקי העליון של מארז פס התמיכה צריך לנוח לרוחב בסיס כף היד לפני הידוק התומך לשורש כף היד.

(ב) כרוך והדק את סוגרי הצמדן. עבור תמיכות עם טבעות D, העבר את הרצועות דרך טבעות ה-D והדק אותן.

(ג) התומך צריך להיות צמוד אך נוח.

שימוש וניקוי: יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.