



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

- دلائل الاستعمال:** التواء/إجهاد خفيف في المعصم • متلازمة النفق الرسغي • دعم وقائي.
- (A) فكّ الأحزمة لفتح غلاف النايلون. يمكن استخدام لفة المعصم مع أو بدون حشوات اسفنجية. راجع تعليمات استعمال الحشوة الاسفنجية.
- (B) أدخل اليد للدعامة. ينبغي أن تكون حافة غلاف النايلون ذات الزوايا على الجزء الخلفي من اليد.
- (C) مرّر الأحزمة عبر الحلقات واربطها بإحكام. ينبغي أن تكون الأحزمة مشدودة ولكن ألا تحصر الدورة الدموية.
- استعمال الحشوة الاسفنجية**
- (D) أمسك بطانة نيوبرين معاً. أدخل بطانة النيوبرين عبر الفتحات في الحشوات الاسفنجية حتى تستند على غلاف النايلون. يمكن استعمال الحشوات الاسفنجية بشكل فردي أو مندمجة من أجل دعم أكبر.
- (E) استمر مع الخطوات C - B لوضع الدعامة.
- الاستعمال والعناية**

- اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيداً. ونشها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
- يمكن قص مادة الحزام الزائدة.

- يمكن تمليس الحافة العلوية بالحشوة الاسفنجية بواسطة ورق صنفرة إذا لزم الأمر.  
**تحذير:** ينبغي عدم استخدام دعامات مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.  
**تحذير:** إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.  
**الكفالة:** ستتفعل DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.