
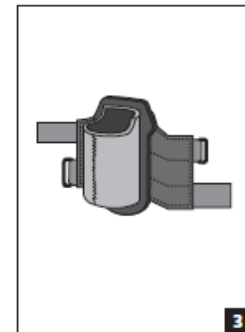
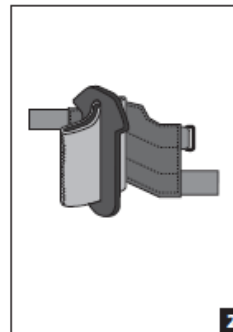


## מעטפת לשורש כף היד

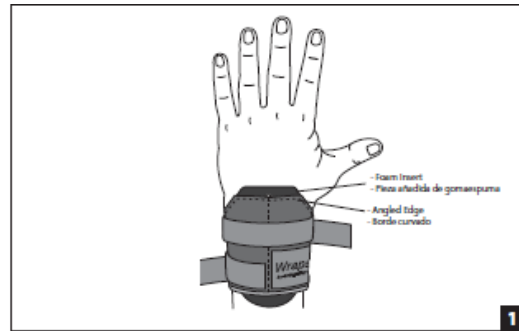

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

**התוויות:** נקעים/מתיחות קלים של שורש כף היד • תסמונת התעלה הקרפלית • מניעה.

(א) שחרר את הרצועות כדי לפתוח את מעטפת הניילון הקשיחה. ניתן להשתמש במעטפת לשורש כף היד יחד עם כריות הספוג או בלעדיהן. ראה הוראות יישום לכרית הספוג.

(ב) השחל את היד דרך התומך. הקצה הזוויתי של מעטפת הניילון הקשיחה צריך לנוח על גב היד.

(ג) העבר את הרצועות דרך הלולאות והדק אותן. הרצועות צריכות להיות מהודקות אך לא לעצור את זרימת הדם.

### יישום כרית הספוג

(ד) צבט את ריפוד הניאופרן יחד. השחל את ריפוד הניאופרן דרך החריצים שבספוג עד שכרית הספוג תנוח על גבי מעטפת הניילון הקשיחה. לנוחות יתרה, ניתן להשתמש בכריות ספוג בנפרד או במשולב.

(ה) המשך לשלבים ב' ו-ג' לעיל ליישום התומך.

### שימוש וניקוי

• יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

• ניתן לחתוך חומרי רצועה עודפים.

• ניתן להחליק את הקצה העליון של כרית הספוג בעזרת נייר זכוכית במקרה הצורך.

**אזהרה:** לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

**אזהרה:** אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הנקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.