


X-Act ROM

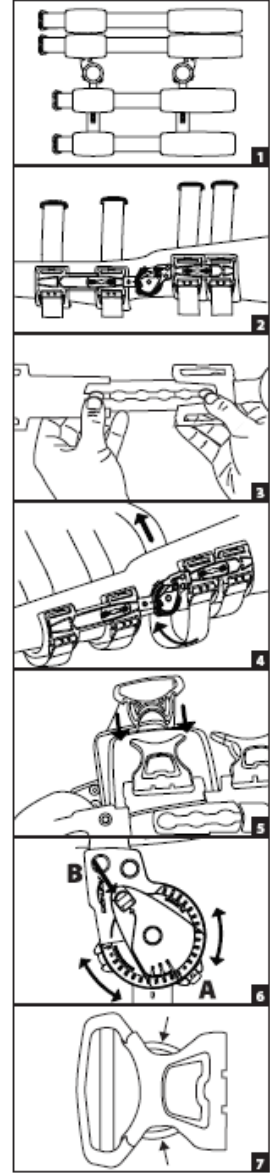

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للثبيت ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصلجات الهاللة. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد ضبط مجال الحركية، تكرار ومدة الاستخدام من قبل أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف الدعامة

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

1. فكّ أطراف الحزام بجوار الأباذيم السوداء وافتح الدعامة لتصبح مسطحة بواسطة سحب العمودين بعيداً عن بعضهما.
2. ضع الساق على الدعامة المسطحة. ينبغي وضع العمود الأقصر على الفخذ. عدّل الدعامة حتى يصبح كل عمود مترافقاً مع خط الوسط بجوانب الساق الإنسية والجانبية.
3. افتح المحرك التلسكوبي للطول المرغوب من خلال الضغط زر القطعة المنزلة حتى الوصول للطول المرغوب. تأكد من أن القضيبين متساويين بالطول وأن كل محرك حزام معلّم على نفس الموقع على كل عمود، على التوالي.
4.
 - عدّل أطوال الحزام:
 - حرّر الحزام من العمود
 - بواسطة سحب الحزام بعيداً عن الجسم، تخلص من الجزء المتدلي على الجزء الخلفي من الدعامة
 - اربط الحزام بالعمود ثانية للحفاظ على الطول
 - تأكد من أن العمدان مترافقان على الجهة الإنسية والجانبية من الساق
5. اشبك كل واحد من مشابك الإبزيم الأسود بالقطعة المنزلة حتى سماع

صوت "كليك". شدّ الأحزمة بواسطة عن طريق سحب الطرف السائب. تخلص من الحزام الزائد وصحح وضعية طرف الحزام التماسحي لحافة الحزام الجديدة.

اربط طرف الحزام بإحكام على الحزام.

6. (A) عدّل المفصلة من خلال الضغط على أزرار التثني والتمديد للداخل وقم بتدوير كباس التوقف حتى تتراصف الزاوية المطلوبة مع مركز الزر. حرر زر الضغط وتأكد من تراجع كلياً للوضع الممدود.

(B) استخدم ميزة الإقفال السريع بالزاوية 0، 15، أو 30 درجة، عن طريق تحريك زر الإقفال السريع الأحمر للداخل حتى يشغل القفل. تأكد من عدم دوران الأعمدة. إذا كانت هناك حاجة لوضع إقفال آخر، راجع الخطوة 7 وتأكد من تحديد زر التثني وكذلك زر التمديد على نفس تعيين الزاوية.

7. لخلع الدعامة، حرر كل واحد من الأباذيم. وعندها يمكن لبس الدعامة ثانية كوحدة واحدة.

تعديلات أخرى:

قد تنتهي قضبان العلافة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق. اثن كل قضيب برفع قضيب الفخذ/بطة الساق بقوة مقابل السطح الصلب واستخدم واضغط باستمرار على العلافة في الاتجاه المطلوب. اثن كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعلافة. لتسهيل الاستخدام بعد العمليات الجراحية، أو قبل المطابقة المشد قبل عملية الجراحة إذا ذلك كان ممكناً.

تعليمات التنظيف:

اغسل البطانات الاسفنجية باليد بمياه باردة (30 درجة مئوية) مع مادة تنظيف معتدلة. اشطفها جيداً.

جففها في الهواء فقط، لا تسخنها.

يوصى بتنظيف المكونات بشكل منتظم.

استشر طبيبك أو المُعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

كفالة: باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

التركيب: بولي بروبيلين 30%، ألمنيوم 40%، نايلون 25%،

درلين 3%، فولاذ مقاوم للصدأ 2%.

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

RX فقط

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص