


## X-Act לטווח תנועה

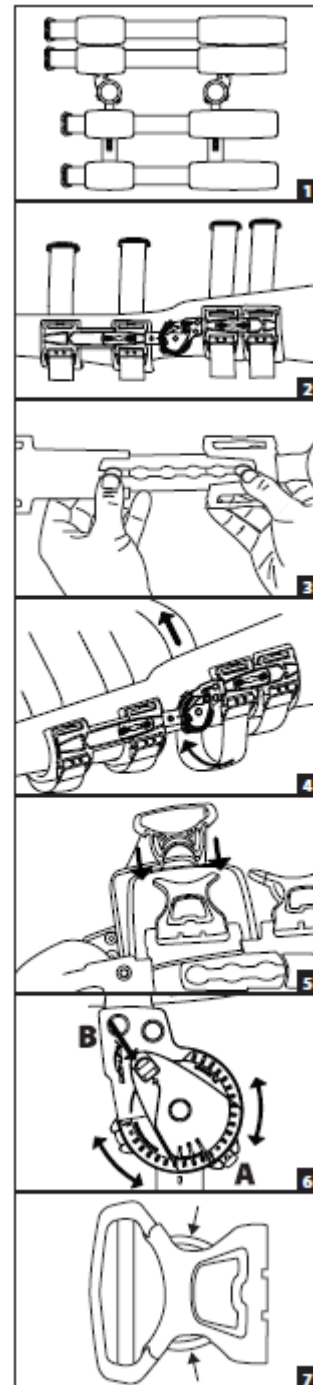

לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: למניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לניתוחי רצועה צולבת קדמית (ACL), רצועה צולבת אחורית (PCL), רצועה קולטרלית צדית (LCL) ורצועה קולטרלית אמצעית (MCL) ולתיקונים של המניסקוס. מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. הרופא שרשם לך את המוצר יקבע את הגדרת טווח התנועה, התדירות ומשך השימוש

## התוויות נגד: אין

**אזהרות:** אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

## הוראות יישום:

1. שחרר את קצות הרצועות שלייד האבזמים השחורים ופתח את התומך למצב שטוח על ידי משיכת שתי הזרועות האנכיות הרחק זו מזו.

2. הנח את הרגל על גבי התומך השטוח. הזרוע האנכית הקצרה יותר מונחת על הירך. כוונן את התומך עד שכל זרוע אנכית תהיה מיושרת מול קו האמצע של הצדדים האמצעי והצדי של הרגל.

3. כוון את הלוחות הטלסקופיים לאורך הרצוי בלחיצה על כפתור ההחלקה עד הגעה לאורך הרצוי. ודא ששני המוטות באורך שווה ושכל לוחית רצועה נמצאת באותו מיקום על כל זרוע אנכית, בהתאמה.

4. התאם את אורך הרצועות:

- שחרר את הרצועה מהזרוע האנכית

- על ידי משיכת הרצועה הרחק מהגוף, מתח את הרפיון מהצד האחורי של התומך

- הדק שוב את הרצועה לזרוע האנכית כדי לשמור על האורך

- ודא שהזרועות האנכיות מיושרות לפי הצדדים האמצעי והצדי של הרגל

5. סגור כל אחד מתפסי האבזמים השחורים אל מוט ההחלקה עד שישמע צליל. הדק את הרצועות במשיכת הקצה החופשי. הסר את עודפי הרצועה ומקם מחדש את קצה התנין של הרצועה לקצה החדש של הרצועה.

הדק את קצה הרצועה לרצועה.

6. א) כוונן את הציר בלחיצה על כפתורי הכפיפה והפשיטה פנימה וסיבוב המעצור עד שהזווית הרצויה מתיישרת מול מרכז הכפתור. שחרר את הכפתור וודא שהוא חזר לחלוטין למצב פשיטה.

ב) השתמש בתכונת הנעילה המהירה ב-0°, 15° או 30°, בהחלקת כפתור הנעילה המהירה האדום פנימה עד שהמנעול ננעל. ודא שהזרועות האנכיות אינן מסתובבות. אם נדרשת הגדרת נעילה אחרת, ראה שלב 7 וודא שגם כפתור הכפיפה וגם כפתור הפשיטה נקבעו באותה הגדרת זווית.

7. להסרת התומך, שחרר כל אחד מהאבזמים. לאחר מכן ניתן להניח מחדש את המייצב כיחידה אחת.

## כוונונים אחרים:

זרועות הצירים עשויות להיות כפופות להוספת קווי מתאר של וארוס או ולגוס. כופף כל מוט על ידי החזקת מוט הירך/השוק בחוזקה כנגד משטח מוצק והחל לחץ עדין ומתמיד על הציר בכיוון הרצוי. כופף כל זרוע צדית במידה שווה מעל ומתחת לציר. לנוחות שימוש מיטבית לאחר ניתוח, התאם מראש את המייצב לפני הניתוח במידת האפשר.

## הוראות ניקוי:

יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים (30°C) עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף היטב.

יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום.

מומלץ לנקות את המייצב באופן סדיר.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**הרכב:** פוליפרופילן 30%, אלומיניום 40%, ניילון 25%, דלרין 3%, נירוסטה 2%.

## **מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

במרשם בלבד

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

**לתשומת לבך:** למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

**זהירות:** על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו