


תומך ברך X-Act Lite לטווח תנועה

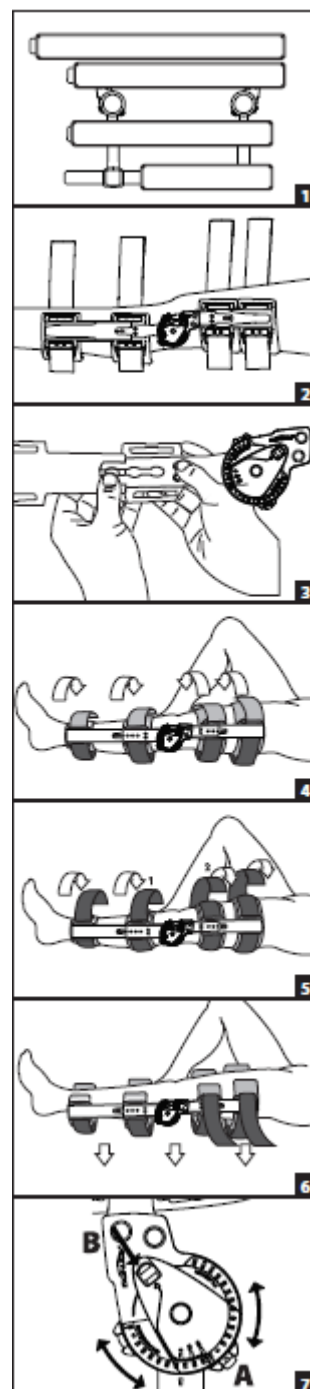

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: למניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לטיפול לאחר טראומה, לניתוחי רצועה צולבת קדמית (ACL), רצועה צולבת אחורית (PCL), רצועה קולטרלית צדית (LCL) ורצועה קולטרלית אמצעית (MCL), ליישור מחדש של פיקת הברך ולתיקונים של המניסקוס או המפרק. מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. הרופא שרשם לך את המוצר יקבע את הגדרת טווח התנועה, התדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

1. שחרר את קצות הרצועות ופתח את התומך למצב שטוח.
2. הנח את הרגל על גבי התומך השטוח. הזרוע האנכית הקצרה יותר מונחת על הירך.
3. כוון את הלוחות הטלסקופיים לאורך הרצוי בלחיצה על כפתור ההחלקה עד הגעה לאורך הרצוי. ודא ששני הצדדים שווים באורכם.
4. ישר את הזרוע האנכית עם ריפוד הספוג המצורף לפי קו האמצע של הרגל. כרוך את רפידות הספוג בהידוק נוח סביב הרגל, תוך השארת הזרוע האנכית הנגדית לא מחוברת, וחבר מלפנים כמוצג. מקם את הזרוע האנכית הנותרת ולחץ אותה למקומה. ודא שהגובה האמצעי והצדי של הציר שווים.
5. העבר את הרצועות דרך טבעות ה-D, הדק קודם את שתי הרצועות הקרובות ביותר לברך ואז את הרצועות הנותרות.
6. להסרה קלה כיחידה אחת, שחרר את הרצועות ופתח את רפידות הספוג. לאחר מכן ניתן להסיר את התומך ולהניחו מחדש כיחידה אחת.

הוראות לכוונון הציר:

- 7א) כוון את הציר בלחיצה על כפתורי הכפיפה והפשיטה פנימה וסיבוב המעצור עד שהזווית הרצויה מתיישרת מול מרכז הכפתור. שחרר את הכפתור וודא שהוא חזר לחלוטין למצב פשיטה.
- 7ב) השתמש בתכונת הנעילה המהירה ב-0°, 15° או 30°, על ידי החלקת כפתור הנעילה המהירה האדום פנימה עד שהמנעול ננעל. ודא שהזרועות האנכיות אינן מסתובבות. אם נדרשת הגדרת נעילה אחרת, ראה שלב 5א' וודא שגם כפתור הכפיפה וגם כפתור הפשיטה נקבעו באותה הגדרת זווית.

כוונונים אחרים:

- זרועות הצירים עשויות להיות כפופות להוספת קווי מתאר של וארוס או ולגוס.
- כופף כל מוט על ידי החזקת מוט הירך/השוק בחוזקה כנגד משטח מוצק והחל לחץ עדין ומתמיד על הציר בכיוון הרצוי.
 - כופף כל זרוע צדית במידה שווה מעל ומתחת לציר.
 - לנוחות שימוש מיטבית לאחר ניתוח, התאם מראש את התומך לפני הניתוח במידת האפשר.

הוראות ניקוי:

- יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים (30°C) עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום. מומלץ לנקות את המייצב באופן סדיר. לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

הרכב: פוליפרופילן 30%, אלומיניום 40%, ניילון 25%, דלרין 3%, נירוסטה 2%.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

במרשם בלבד

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.