


دعامة الركبة X-Act ROM Lite

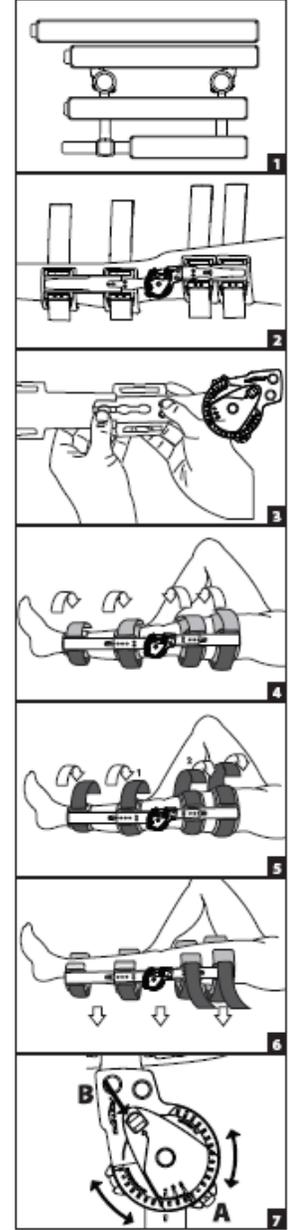

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للتثبيت ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصلجات الهاللة. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد ضبط مدى الأوضاع الحركية، وتيرة ومدّة الاستخدام من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

1. فك أطراف الحزام وافتح الدعامة واجعلها منبسطة.
2. ضع الساق على الدعامة المسطحة. ينبغي وضع العمود الأقصر للفخذ.
3. افتح المحرك التلسكوبي للطول المرغوب من خلال الضغط على زر القطعة المنزلقة حتى الوصول للطول المرغوب. تأكد من أن كلا الجانبين متساويين في الطول.

4. حاذ الجانب أعلى اليمين مع البطانة الإسفنجية إلى خط الوسط للساق.
لف السنادات الإسفنجية على قدر الجسم حول الساق، تاركًا الجهة أعلى اليمين المقابلة المربوطة، واربطها مسبقًا كما هو مبين. ضعها واضغط عليها باتجاه الأعلى في المكان. تأكد من أن طول العلاقة الإنسية والجانبية متساويًا.
5. اربط الأحزمة من خلال الحلقة-D واربط الحزامين الأقرب إلى الركبة أولًا، ثم اربط باقي الأحزمة.
6. لنزع سهل كقطعة واحدة، فكّ الأرباط وافتح السنادات الإسفنجية. وعندما يمكن خلع الدعامات ولبسها ثانية كوحدة واحدة.

تعليمات لتعديل المفصلة

- 17) عدل العلاقة بتخفيض أضرار الانثناء والامتداد للداخل ولف التوقف حتى تحاذي الزاوية المطلوبة مع مركز الزر. حرر زر الضغط وتأكد من تراجعه كليًا للوضع الممدود.
- 7ب) استخدم ميزة الإغلاق السريع في 0 أو 15 أو 30 درجة بضغط زر الإغلاق السريع الأحمر للداخل حتى يتم الإغلاق. تأكد من عدم دوران الأعمدة. إذا كان مطلوب وضع إغلاق آخر، انظر الخطوة 15. وتحقق من أن كلا أزرار الانثناء والتمدد موضوعة في نفس زاوية الوضع.

تعديلات أخرى:

- قد تنتهي قضبان العلاقة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق.
- اثن كل قضيب برفع قضيب الفخذ/بطة الساق بقوة مقابل السطح الصلب واستخدم واضغط باستمرار على العلاقة في الاتجاه المطلوب.
 - اثن كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعلاقة.
 - لتسهيل الاستخدام بعد العمليات الجراحية، أو قيل المطابقة المشد قبل عملية الجراحة إذا ذلك كان ممكنًا.

تعليمات التنظيف:

- اغسل البطانات الاسفنجية باليد بمياه باردة (30 درجة مئوية) مع مادة تنظيف معتدلة. اشطفها جيدًا.
جففها في الهواء فقط، لا تسخنها.
يوصى بتنظيف المكونات بشكل منتظم.
استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامات.
كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
التركيب: بولي بروبيلين 30%، ألومنيوم 40%، نايلون 25%، درلين 3%، فولاذ مقاوم للصدأ 2%.

مخصص لاستخدام مريض واحد.

RX فقط

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وهذا الجهاز هو عنصر واحد في برنامج العلاج الشامل الذي يديره الأخصائي الطبي. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.