


תומך מרפק X-Act ROM

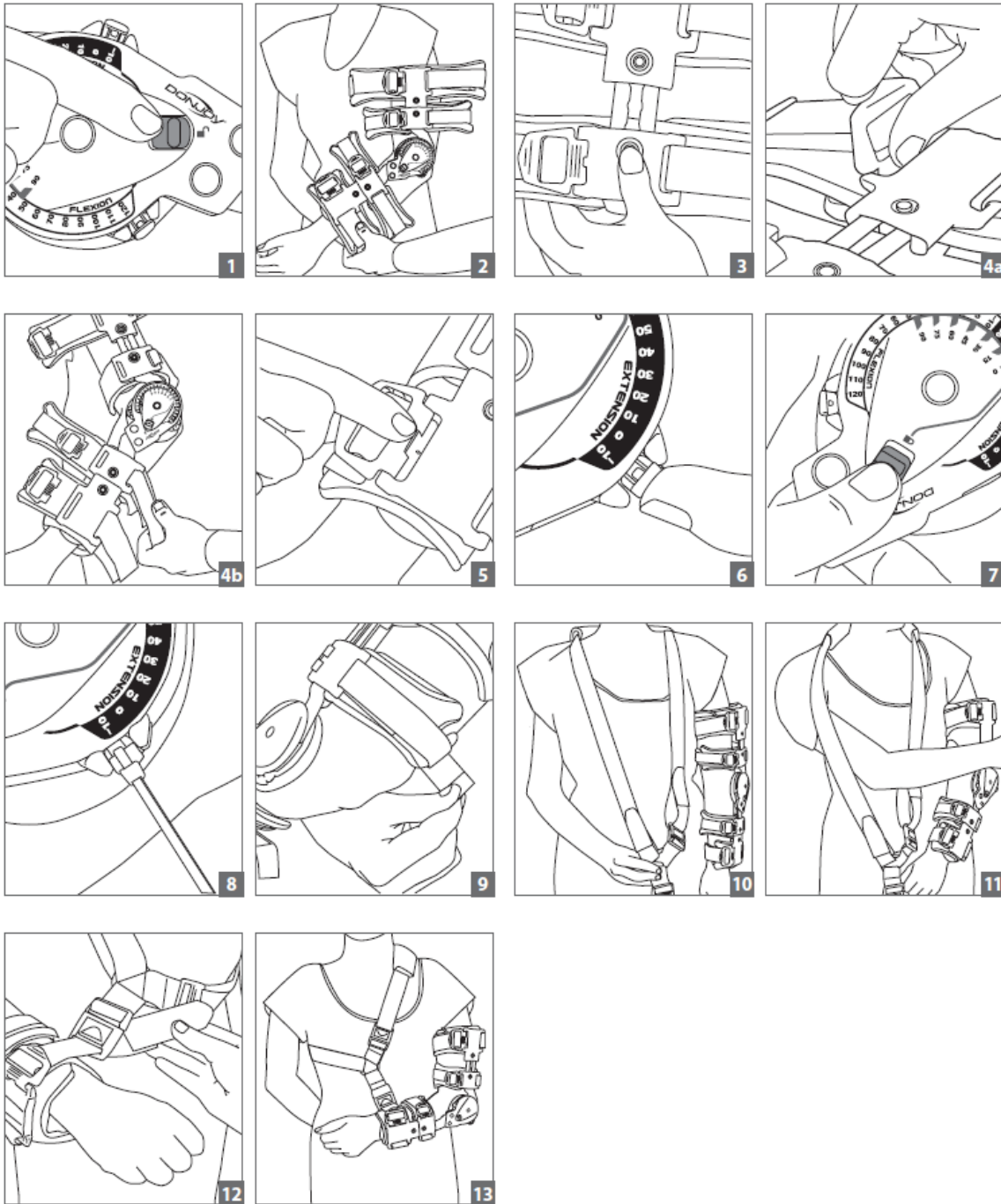

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: מספק בקרה קבועה או לטווח תנועה לאחר פציעה או הליך לאחר ניתוח של המרפק; שברים יציבים; תיקון השריר הדו-ראשי; ופציעות קלות עד חמורות ברקמה הרכה.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

1. שחרור הציור. תומך המרפק X-Act ROM ארוז במצב נעול. כדי לשחרר את התומך, החלק את כפתור הנעילה המהירה האדום הרחק ממרכז הציור.

2. מיקום התומך. מקם את נקודת האמצע של הציר מעל האפיקונדיל הצדי (בצד החיצוני של המרפק) **הערה: כאשר התומך מונח, כפתור הנעילה המהירה האדום צריך להיות מתחת למרפק.**

3. אורכי זרועות ה-Telefit. כאשר הציר מיושר מול האפיקונדיל (נקודת האמצע של המרפק), כוונן את המיקום של כל ארבעת השרוולים. לחץ על כפתור ההחלקה ומקם את שני שרוולי האמה ולאחר מכן את שני שרוולי השריר הדו-ראשי למיקום הרצוי. **הערה:** ודא ששרוול השריר הדו-ראשי הקרוב לגוף מוארך לתנוחה הנוחה ביותר, אך אינו פוגע בבית השחי ושרוול האמה המרוחק ממוקם מעל לזיז הסטילואיד (גבשושית בחלק הצדי של שורש כף היד). **אל תנסה להסיר את מוטות ההחלקה ממוט הציר.**

4. הנח את התומך. שחרר את ארבעת אבזמי התפס המהיר שעל מוטות ההחלקה על ידי סיבוב קצה השחרור מעלה עד שהתפס יוצא מהמוט. הנח את הזרוע בתומך.

4ב. התחל מהשרוולים הקרובים ביותר למרפק, כרוך את השרוולים סביב האמה והזרוע.

5. הדק את הרצועות. התחל בשורש כף היד, סגור כל אחד מאבזמי התפס המהיר אל מוט ההחלקה וודא שנשמע צליל נקישה. הדק את הרצועות להצמדה נוחה. **גזור את הרצועות לפי הצורך.** הסר את לשונית התנין של הרצועה; קצר את הרצועה; החזר את לשונית הרצועה. **הערה:** רפידות רצועות זרוע ארוזות עם התומך לנוחות ולמניעת תזוזה.

6. כוונן הציר לטווח תנועה. תומך המרפק X-Act מאפשר טווח תנועה מלא במרווחים של 10° , בכפיפה של החל מ- 10° ועד 120° . להתאמת הכוונן, לחץ על כפתורי הכפיפה והפשיטה והעבר אותם לטווח התנועה (ROM) שנרשם.

7. נעילה מהירה. למניעת כל טווח תנועה, החלק את כפתור הנעילה המהירה האדום למצב נעול. ניתן לנעול את תומך המרפק X-Act בכפיפה של 0° , 15° , 30° , 45° , 60° , 75° , או 90° .

8. היענות המטופל. במקרה הצורך, כלולים שרוכי נעילה עם כל תומך. השחל שרוך דרך החור בכפתורי הכפיפה והפשיטה כדי לשמור על הגדרות טווח התנועה שנרשמו.

9. הסרה ויישום מחדש של תומך המרפק X-Act ROM. שחרר מעט את הרצועות שעל כל שרוול ונתק את התפס על מוטות ההחלקה בסיבוב התפס מעלה עד שהתפס יצא מהמוט. שחרר את השרוולים. **חבר בחזרה את התומך בקלות ביד אחת. ישר את הציר במרפק.** סגור את השרוולים סביב הזרוע להצמדה נוחה. סגור את האבזמים אל מוטות ההחלקה. הדק את הרצועות למידה הנכונה.

יישום מתלה כתף:

10. שחרר את שתי הרצועות שבמתלה הכתף, העבר את רצועת הכתף מעל הראש כך שהרצועה תשב על שתי הכתפיים, כמו צווארון.

11. העבר את היד שאינה פגועה דרך מתלה הכתף וודא שרצועה אחת עוברת לרוחב הגב. רצועת הכתף צריכה לעבור מעל הכתף של הזרוע הפגועה.

12. חבר את מתלה הכתף לתומך בהשחלת רצועת שורש כף היד דרך האבזם של מתלה הכתף. כרוך את הרצועה סביב שרוול שורש כף היד וסגור אותה.

13. הזז את קצות רצועות צמדן המגע שעל מתלה הכתף כך שירימו את הזרוע לתנוחה נוחה. במקרה הצורך ניתן לגזור את הרצועה. לנוחות, מקם את רפידת הכתף באזור הצוואר כנדרש.

להסרת המתלה - השתמש באבזמי השחרור המהיר להסרה והחזרה של המוצר בקלות

הוראות ניקוי:

יש להסיר ולכבש את ריפודי השרוולים המעוצבים ואת רצועות התומך ביד, במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום. מומלץ לנקות את המייצב באופן סדיר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

תכולת החומרים: ניילון, אלומיניום, פלסטיק, לייקרה, ספוג, פלדה ואבץ

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

במרשם בלבד

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.