

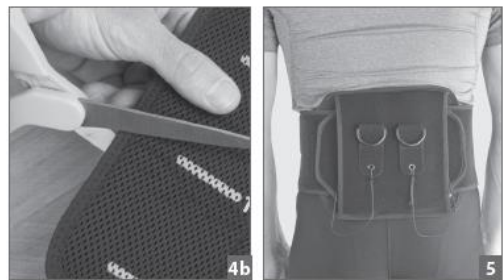


X-Act ROM™ Hip

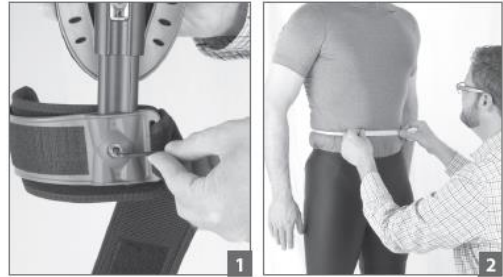

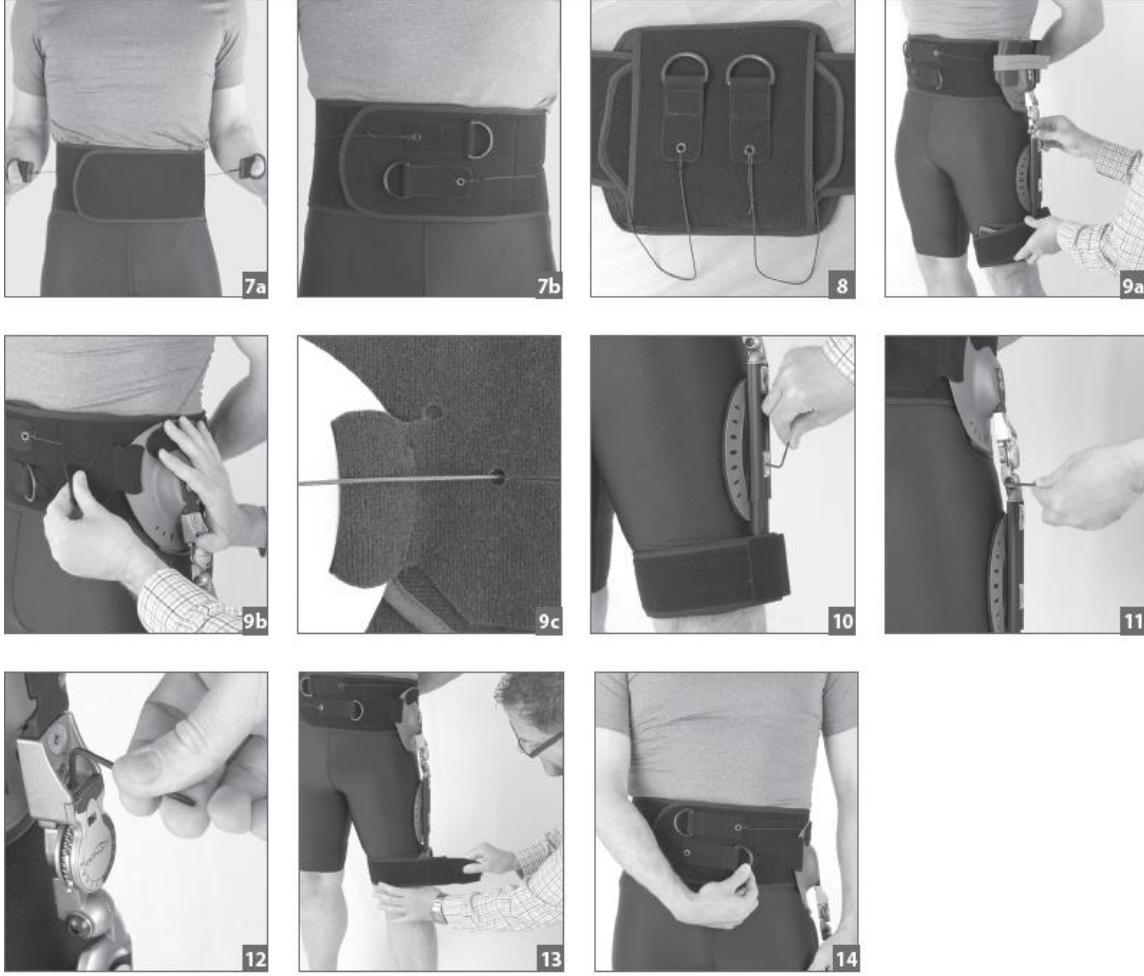

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن..الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال

- إجراءات علاج الورك بأقل تدخل جراحي
- إصلاح الأربطة، مع أو بدون إصلاح الألوية الوسطى
- تتحكم ROM متابعة الجراحة الأولية أو جراحة تغيير الورك
- بعد عملية إصلاح أوتار الركبة القريبة

موانع الاستعمال:

- للمرضى المعرضون لخطر الخلع الأمامي
- الخلع المزمن

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال/التطابق:

يوصف جهاز تقويم الورك X-Act ROM للحماية والاستقرار للمرضى الذين خضعوا لمختلف إجراءات العمليات الجراحية في مفصل الورك. يجب أن يلائم الأخصائي جهاز التقويم مباشرة على المريض للتأكد من أن جهاز تقويم الورك X-Act ROM يوفر مدى الحركة والسيطرة المطلوبة. وعندما يكون ذلك ممكناً، يجب أن يتم تقييم جهاز التقويم في مجموعة متنوعة من الأوضاع بما في ذلك الاستلقاء والجلوس، من أجل تقييم ما إذا كان المريض قادراً على الحفاظ على الورك في الوضع المناسب. عندما لا يمكن أن تحقيق كمية مناسبة من السيطرة بسبب الوزن الزائد أو الضعف أو ضعف الامتثال أو عدم الاستقرار الحاد، يجب استخدام جهاز تقويم أكثر صلابة لتحقيق السيطرة المطلوبة. اتصل بالأخصائي إذا كان المريض غير قادراً على تحمل جهاز التقويم و/أو لم يستمر بلبسه لأي سبب. تتوفر تعليمات المطابقة مع كل جهاز تقويم ويجب اتباعها بدقة. قد ينتج عن الفشل في تنفيذها تطابق ضعيف لجهاز التقويم الذي يعجز حينها عن توفير الحماية والوظيفة والثبات. يجب أن يكون المرضى على علم بأن الامتثال الضعيف للمريض بما في ذلك ارتداء الجبيرة بأقل مما تم تحديده، وارتداء جبيرة فضفاضة جداً أو عدم الامتثال مع الاحتياطات الخاصة بالورك قد يؤدي إلى نتائج سريرية سيئة.

X-Act ROM Hip Orthosis – حجم واحد يلائم أغلب أحجام الخصر 26” – 66” (66 سم – 167 سم)

تركيب المنتج

1. تم شحن جهاز X-Act ROM Hip للأخصائي مجعماً للورك الأيسر. لتغيير جهاز X-Act ROM Hip إلى الجانب الأيمن، انزع البرغي والدعامة التي تلصق بطرف كُم الفخذ إلى القضيبة الخلفي. أدر طرف كُم الفخذ 180 درجة وأعد وضع البرغي والدعامة إلى القضيبة الخلفي.

تجميع الحزام

2. مكونات حزام جهاز التقويم مجزء إلى الطول ليناسب أحجام مختلفة للخصر. قم بقياس المريض من الخصر في الوضع العادي بالسنتيمترات.

3. يجب تفكيك الحزام قبل القص. أولاً ضع كلا أسنة السحب على خلف الحزام كما هو مبين لتجنب قص الحبال.

4. تُلصق اللوحات مع Velcro® تحت اللوحة الخلفية. انزع كل لوحة جانبية وقص على طول الخطوط المطبوعة على كل اللوحتين الجانبيتين وفقاً للقياسات الخاصة بك، مكتملاً لأقرب 10 سنتيمتر. أعد لصق كلا اللوحتين الجانبيتين.

استخدام جهاز تقويم الظهر

5. ثبت اللوحة الخلفية على ظهر المريض.

6. لف الحزام حول المريض وأغلقه من الأمام مع سداة Velcro®.

7. يوجد لسان سحب على كل جانب والتي تسمح للمريض بربط الحزام على قدر الجسم حول الحوض. لتقصير الحبال قص لسان السحب أسفل العقدة. اسحب الحبال بطول كافٍ ليتقاطع على قدر الجسم عندما يكون قريباً من خط الوسط. أعد ربط الحبل مع لسان السحب واربط عقدة ثابتة. مطلوب 4 عقد مشدودة. يجب وضع أسنة السحب بحيث تكون سهلة الوصول للمريض.

8. ثبت أسنة السحب على خلف الحزام مرة أخرى.

وضع صدفة الورك

9. أ. بالضغط على الحزام المثبت على المريض، أربط صدفة الورك مع المفصل الموضوع في خط الوسط والمحاذي مع مفصل ورك المريض.

B. انزع الحزام الأحمر لتربط أسنة Velcro®.

C. إذا كانت صدفة الورك قريبة من اللوحة الخلفية وتغطي واحدة من الحبال، أدخل الحبل من خلال قلاب Velcro®.

تعديل المكونات الفخذية

10. فك البرغي الأوسط وضع مجداف الفخذ البعيدة إلى المدور وطرف كُم الفخذ القريب من الركبة. أعد شد البرغي.

لتعديل AB/AD محددات Duction ROM

11. فك البرغي على جانب كرة مفصل الورك وضعه لملائمة نمو ورك المريض للحفاظ على الساق في خط الوسط.

تعديل الانثناء والامتداد

12. تعديل انثناء وامتداد التوقفات من خلال تفكيك مجموعة من البراغي على أعلى المفصل وتدوير الأسنة على منصات السيطرة. أعد شد مجموعة البراغي على أعلى المفصل.

تثبيت طرف كُم الفخذ

13. ضع طرف كُم الصلب مقابل ساق المريض. لف Velcro® حول طرف كُم وثبته. إذا كان الحبل طويلاً جداً، انزع لسان Velcro® من نهاية الحزام، ثم قص الحزام بالمقص لتجعل الطول مناسباً. استبدل لسان Velcro® فوق نهاية طرف الحزام المشدب.

14. شد الحزام من خلال سحب أسنة السحب للأمام ومررها عبر السداة الأمامية لكي تكون سهلة الوصول.

تعليمات التنظيف:

يمكن تنظيف أسطح جهاز تقويم الورك X-Act ROM بصابون لطيف مع الماء، (86 درجة فهرنهايت/30 درجة مئوية)، يستخدم مع قطعة قماش مبللة اشطف القماش وامسح أي بقايا للصابون والأوساخ دع جهاز تقويم الورك X-Act ROM يجف في الهواء. لا تغسله في الغسالة أو تضع جهاز التقويم في نشافة الملابس. لا تستعمل مواد التبييض. الكي ممنوع. لا تغسله بطريقة الغسيل الجاف.

المحتويات المادية:

البوليستر والنايلون والبولي إيثيلين وسيليكون وبولي كربونات والبولي فينيل كلوريد ومرونة والألمنيوم

التحذيرات والاحتياطات:

كشروط لبيع أي من منتجات DJO، LLC، يقتصر جهاز التقويم "استخدام فردي فقط" من قبل المريض المطابق أصلاً. يكفل المُصنع أنه قد تم التحقق من جودة جهاز التقويم المغلق فقط ويمكن أن تكون فعالة لبعض الاستعلامات، ولكن يجب أن يتم اتخاذ القرارات النهائية والمراقبة المستمرة من قبل أخصائي التجبير (أخصائي التجبير) الذي يصف و / أو يطابق جهاز التقويم ليحدد فعاليتها للمريض بمفرده. يجب تجنب أي توضيح أو تنفيذ للكفالة إذا استخدم جهاز التقويم. بالإضافة إلى ذلك، رخصة حق الاستعمال بموجب أي براءات اختراع ذات الصلة المتعلقة بجهاز التقويم ويتم إنهائه مع وقف استخدامه من قبل المريض الأصلي. كما هو الحال مع جميع منتجات DJO، LLC، يجب أن توصف هذه الأجهزة التقويمية وتطبيقها من قبل أخصائي العظام المؤهل لتحديدته لتبلي احتياجات مريض معين وبحقق النتائج المرجوة. كفالة: بإطار كفالة DJO، LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

مُعد لاستخدام مريض واحد فقط.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التوافق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وهذا الجهاز هو عنصر واحد في برنامج العلاج الشامل الذي يديره الأخصائي الطبي. ليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيمنع الإصابة.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة الأمريكية). يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو يطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص