


## מגף סוכרת XP

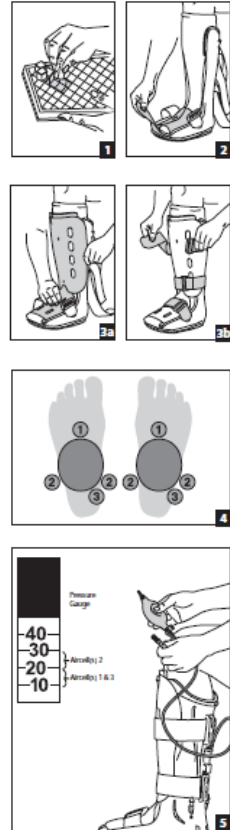

לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

### שימוש מיועד/התוויות:

מערכת מגף הסוכרת XP מספקת לחץ פועם מדורג ותמיכה פנאומטית הממקסמת את הקלת העומס הפלנטרי, מסדירה מאמצי גזירה, שולטת בבצקת ומספקת הגנה ומניעת תזוזה. מגף הסוכרת XP מספק גם הגנה על כף הרגל ומומלץ לטיפול בכיבים נירופתיים, פגיעה ברקמות רכות, שימוש לאחר ניתוח ושבר יציב בכף הרגל ו/או בקרסול.

**התוויות נגד:** לא רלוונטי

### אזהרות:

אין לנפח את כריות האוויר יתר על המידה. ניפוח לא נכון של כרית האוויר עלול לגרום לגירוי ניכר של העור באנשים עם נירופתיה סוכרתית.

הפחת את הלחץ בכרית האוויר בכל מקרה שנצפה שינוי בעור או שקיימת אי-נוחות. אין להשתמש באביזר זה במטופלים שאינם מסוגלים לדווח על אי-נוחות גופנית. בדומה לכל אביזרי הקיבוע לגפיים התחתונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר, אלחוש לאחר ניתוח, נירופתיות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או לטיפול בפצעים. יש להיזהר בהליכה על משטח חלק או רטוב, כדי למנוע פציעה.

Comment [GM1]: shear stress

## הוראות יישום:

### (1) הכנת המגף

- התר את הרצועות, הסר את הפנל הקדמי ופתח את הכנפיים המיועדות לכף הרגל ואת כיסוי האצבעות.
- גרוב גרב.

### (2) בחירת מדרס

המגף מגיע עם שני מדרסים, מדרס Plastazote ורוד (מגיע מונח במגף) ומדרס Impax Grid (בתוך תיק העזרים).

מדרס ה-Impax Grid מאפשר הסרה של קוביות ספוג חתוכות מראש להקלה נוספת בלחץ. כדי להשתמש במדרס Impax Grid, אתר והסר את קוביות הספוג החתוכות מראש מהחלק התחתון של הרפידה סביב אזורי הפצע/ים (תרשים 1). הסר את מדרס ה-Platazote הוורוד שבמגף והחלף אותו במדרס Impax Grid (הצד הוורוד כלפי מטה).

הצד הכחול של מדרס ה-Impax Grid צריך להימצא כנגד הצד הפלנטרי של כף הרגל.

### (3) הנחת המגף

- בישיבה, הכנס את הרגל למגף ומקם את הרגל באופן שטוח על המדרס כאשר העקב באחורי המגף (תרשים 2).

• החלק את הקמטים בגרב ובכריות האוויר.

• עטוף את הכנפיים לכף הרגל סביב כף הרגל ואת כיסוי האצבעות סביב האצבעות.

• החזר את הפנל הקדמי למקומו: החלק התחתון יהיה בתוך המגף, והחלק העליון מחוץ למגף (תרשים 3א').

• סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה עד הידוק נוח (תרשים 3ב').

### (4) נפח את כריות האוויר באמצעות בלון הניפוח הידני

• הסתכל על סדר השסתומים עבור הרגל המתאימה ועל מיקום שסתום מספר אחד (תרשים 4).

• הכנס היטב את הקצה הלבן של צינור האוויר השקוף לתוך שסתום מספר אחד.

• לחץ את בלון הניפוח הידני עד שהקצה התחתון של מחוון מד הלחץ השחור יהיה מעל המספר 30 (תרשים 5).

• השאר את צינור האוויר בתוך השסתום והפסק ללחוץ על בלון הניפוח הידני – מחוון מד הלחץ ייפול באיטיות.

• נתק את צינור האוויר מהשסתום כאשר הקצה התחתון של המחווון נמצא בלחץ הנכון (תרשים 5).

• חזור על כך עבור שסתומים מספר שניים, ושלוש.

הקפד לבדוק את הלחץ בכרית האוויר בעזרת מד הלחץ בכל פעם שמתאימים את התומך ו/או מהדקים או משחררים את הרצועות.

### (5) הוצא אוויר מכריות האוויר לפני הסרת המגף

כדי להוציא אוויר, הכנס בחוזקה את הקצה השחור של בלון הניפוח הידני המסומן "deflate" (הוצאת אוויר) לתוך השסתום ולחץ על בלון הניפוח.

## שימוש בגבהים

כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית.

כוון את הלחץ בכרית האוויר באמצעות בלון הניפוח הידני עם מד הלחץ.

## הוראות ניקוי:

את ריפוד הספוג של המגף הפנאומטי לסוכרתיים יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין ולהניח לו להתייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה או באמצעות מקור חום אחר.

### **מדרסים וגרביים חלופיים:**

יש להחליף את המדרס והגרבי של המגף יחד עם ו/או בהמלצת איש צוות רפואי. גרביים ומדרסים נוספים זמינים בערכת ההחלפה של מדרסי Plastazote (R-L01, R-M01, R-S01) או בערכת ההחלפה של מדרסי Impax Grid (PI-L01, PI-M01, PI-S01).

### **מגף הסוכרת XP ניתן לנעילה:**

ניתן לאבטח את מגף הסוכרת XP במצב נעול באמצעות ה-Aircast Brace-Lok (P41401) כדי לסייע בניטור התקדמות המטופל.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל גגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

במרשם בלבד

### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.