

## Patella X Strap

**לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.**

**התוויות:** ברך קופצים (דלקת של גיד הפיקה), מחלת אוסגוד-שלטר או ברך אצנים (כונדרומלציה של פיקת הברך)

א) כאשר הרגל כפופה מעט, מקם את החלק הרחב של הרצועה עם הלוגו של DonJoy בחלק האחורי של הברך.

ב) כרוך את הרצועות סביב החלק הקדמי של הברך והכנס את הקצוות דרך החריצים ברצועות כך שניתן להדק אותן. הדק אותן עד שתרגיש בנוח.

המיקום צריך להיות בדיוק מתחת לפיקה.

### **שימוש וניקוי**

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר.

**אזהרה:** אין להשתמש אם יש לך דליות. אין להשתמש במיטה או במטוס. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

### **תכולת החומרים: ניאופרן**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד**

### **לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי**

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.